

管理医療機器 歯科メタルセラミック修復用陶材

ノリタケスーパーポーセレンAAA

Super Porcelain
AAA



ノリタケスーパーポーセレン AAA の3つのAとは…

A 耐クラック性に優れています。

さまざまな焼成条件においても、熱膨張の変動が極めて少ないようにつくられています。このため、プレシャス系合金、セミプレシャス系合金及びノンプレシャス系合金を使用し、ロングスパンブリッジ製作時にもクラックが生じにくくなっています。

A 黄変が少ない陶材です。

銀による黄変の心配が少ないので、後ろう付け強度の低い銀を含有しないセミプレシャス系合金を使用する必要はなく、銀含有のセミプレシャス系合金も、ご使用いただけます。

A 天然歯に近似した色調を表現できます。


日本人の天然歯と同じく、すっきりした青白色の蛍光色（酸化ウラニウムは含有していません）を付与してありますので、天然歯に近似した色調を表現できます。

色調の追加

エナメル質層の色調表現の幅を広げるために、トランスルーセントとラスターを追加しました。

●トランスルーセント

T Clear
Txよりも高い透光性を有する。

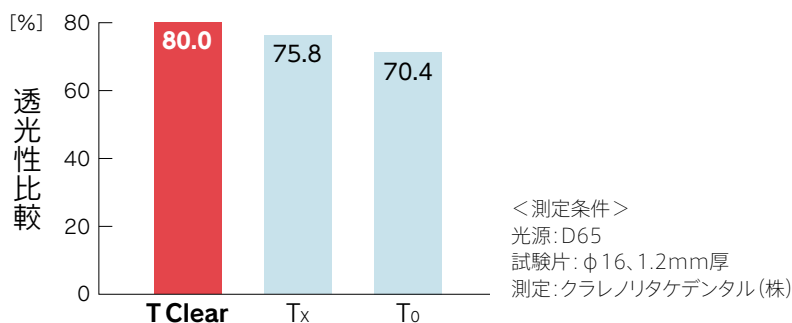

●ラスター

LTx
LT₀よりも高い透光性と強いオパール性を有する。切端の透明感を強調する。

LT Royal Blue
切端の青味を強調する。

LT Super Luster
最も強いオパール性を有する。光拡散効果により明るいエナメル色を表現する。

LT Coral
淡いピンク色を有する。歯頸部、咬合部、切端部などピンク味を付与する。




反射光における色調

左 LTx、右 LT Super Lusterのパウダーのみを使用し、歯の形態を模倣したサンプル


ペーストオペーク

各6g/2.4mL **202280093**、(NP Bonder) **202280096**

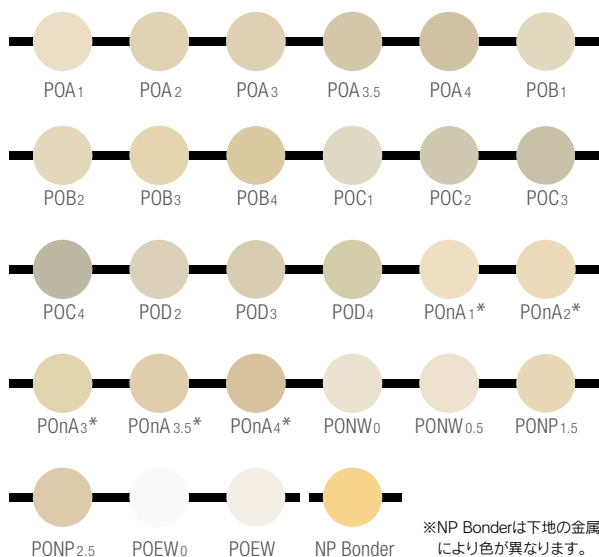


ペーストオペークモディファイヤー

各3g/1.2mL **202280095**

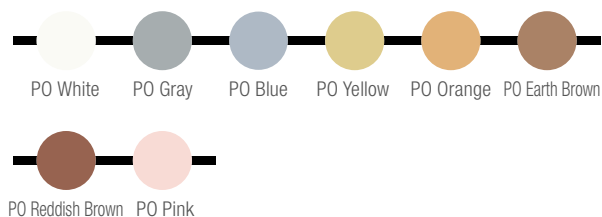

パウダーオペーク

各10g **202280210**
OS:10g **202280280**

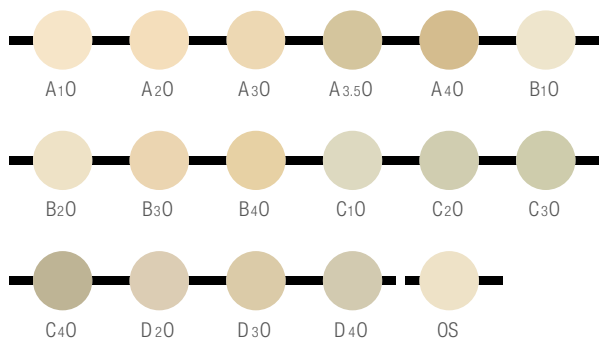


* n Color について

従来からのAシェードでは表現が難しい症例(陶材の厚みが十分に確保できない場合など)でも彩度が高く対応しやすい色調となります。


マージン

各10g **202280300**

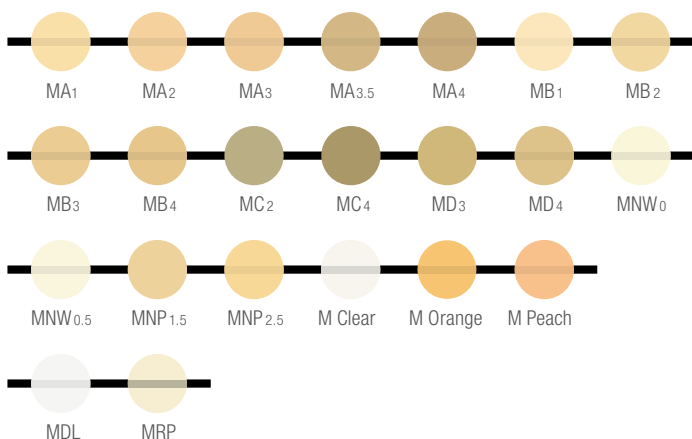

オペーシャスボディ

各10g **202280451** / 各50g **202280452**

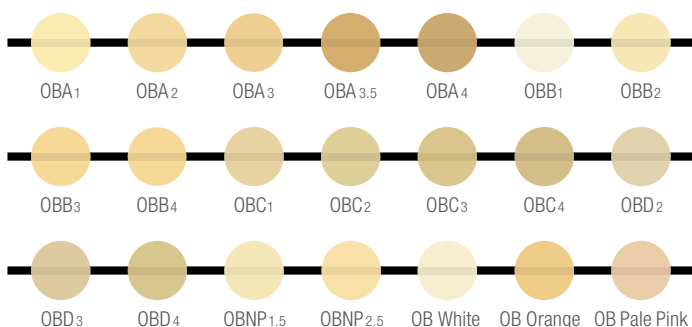


サービカル

各10g **202280270** / 各50g **202280271**




ボディ

各10g **202280220** / 各50g **202280221** / 各200g **202280222**

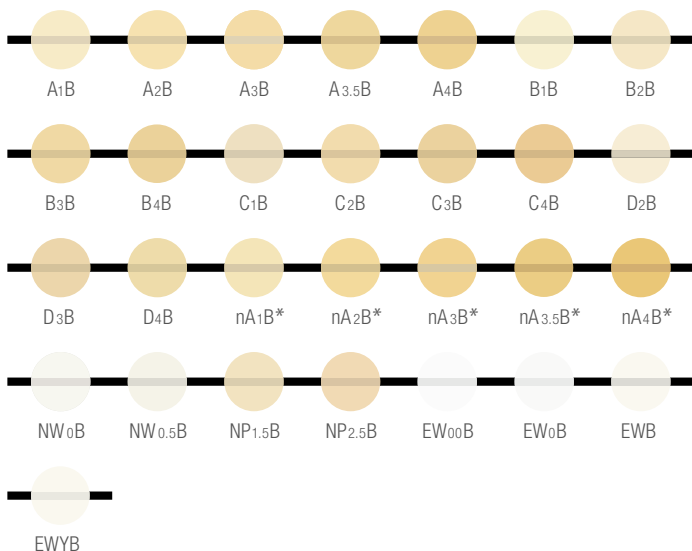


エナメル

各10g 202280230／各50g 202280231
各200g 202280232

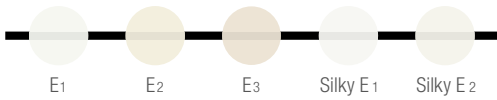

トランスルーセント

各10g 202280240／各50g 202280241
各200g 202280242

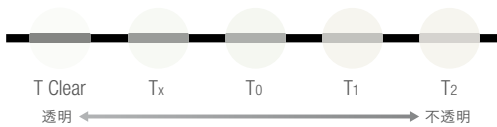


ラスター

各10g 202280551／各50g 202280552



クリアサービカル

各10g 202280270

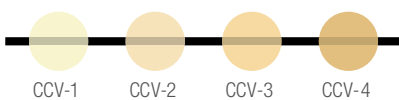


マメロン

各10g 202280310




ティッシュ

各10g 202280320

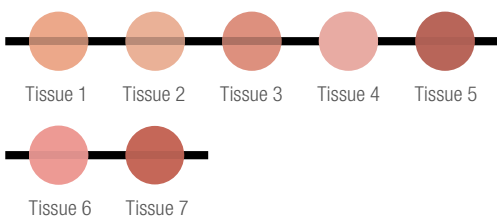


モディファイヤー

各10g 202280250

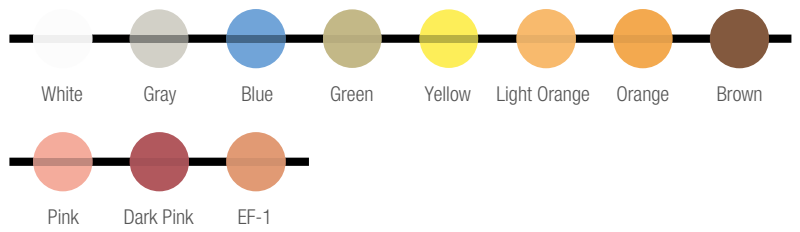

アドオン

各10g 202280290

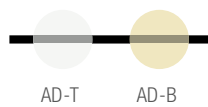

インターナルステイン

各3g 202280531




エクスターナルステイン

各3g 202280541／Glaze:10g 202280542



アドメイト

各10g 202280523

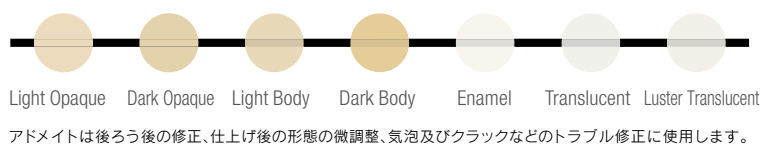

コバルトクロム合金に対応した
ペーストオペーク
●NP Bonder



〈使用方法〉



1. ディギャッシング
メタルフレーム調整
後、ディギャッシング



2. ウォッシュ塗布
NP Bonderをメタル
フレームにすり込
むように薄く塗布



3. 1次塗布
NP Bonderを下地
の色を70%遮蔽で
きる厚さで塗布



4. 1次焼成



5. 2次塗布・焼成
2次塗布では目標
色を表現するた
めのペーストオペ
ークを下地の色を完
全に遮蔽できる厚
さで塗布、焼成

ボディ等の
陶材を築盛

詳しくは取扱説明書を参照ください。

〈使用ステップ〉



1. 形成後の支台歯の状態



2. ボディ、エナメル、ラスターを築盛、焼成し、イン
ターナルステインで内部構造をキャラクタライズ



3. ラスターを焼成後、形態修正、研磨、完成



4. 口腔内装着

写真提供：大谷歯科クリニック 大谷 一紀先生・湯浅 直人先生

詳しくは取扱説明書を参照ください。

焼成スケジュール例

焼成の種類	乾燥	焼成開始	真空開始	昇温速度	真空値	真空解除	焼成最高	係留		冷却
	分	℃	℃	℃/分	kPa ^{※1}	℃	℃	真空	大気	
ペーストオペーク(NP Bonder)	8	500	500	65	96	980	980	—	1	0
パウダーオペーク 1次	3	600	600	55	96	930	940	—	—	0
パウダーオペーク 2次	5	600	600	55	96	920	930	—	—	0
マージン ^{※2}	5	600	600	55	96	920	930	—	—	0
サービカル、オーバーシャスボディ、ボディ、 エナメル、マメロン、モディファイヤー ^{※3}	7	600	600	45	96	920	930	—	—	0
インターナルステイン	5	600	—	55	0	—	830	—	—	0
セルフグレース	5	600	—	50	0	—	930	—	—	0
エクスターナルステイン(Glaze含む)	5	600	—	50	0	—	910	—	—	0
アドメイト(焼成と同時にツヤを出す場合)	5	450	450	45	96	690	700	—	—	0

※1: 96kPa=72cmHg ※2: 「マジックフォーマー」の使用時は乾燥7分、焼成700℃、真空開始700℃ ※3: 単冠の焼成を基準としています。ブリッジの場合は焼成条件を調整してください。

【ご注意】 焼成温度は、各々のファーンスの状態や症例の違いによって調整が必要です。焼成温度の過不足によってクラック、剥離
もしくは強度不良などトラブルの原因となります。必ず、試し焼きを行い適正温度を確認の上、ご使用ください。

セット

イントロキット (計19色)

注文番号			
202280205			
ペーストオベーク	POA2, POA3, POA3.5 (各6g/2.4mL)	エナメル	E2, E3 (各10g)
マージン	MA2, MA3, MA3.5 (各10g)	トランスルーセント	Tx, T1 (各10g)
オペーシャスポディ	OBA2, OBA3, OBA3.5 (各10g)	サービカル	CV-1 (10g)
ボディ	A2B, A3B, A3.5B (各10g)	ラスター	LT1, Creamy Enamel (各10g)

●フォーミングリキッド、ペーストオベークリキッド(各10mL)、達人ブラシ(#B)、ペーストオベークブラシ(各1本)

ラスターコンプリートキット (計19色)

注文番号	
202280549	
LTX, LT0, LT1, LT Super Luster, ELT1, ELT2, ELT3, LT Natural, LT Super Gray, T Blue, LT Royal Blue, Aqua Blue1, Aqua Blue2, LT Yellow, Incisal Aureola, Sun Bright, LT Coral, Creamy Enamel, Creamy White (各10g)	

エナメル/トランスルーセントキット (計10色)

注文番号	
202280548	
E1, E2, E3, Silky E1, Silky E2, T Clear, Tx, T0, T1, T2 (各10g)	

インターナルステイン コンプリートキット (計19色) 内部ステイン用

注文番号	
202280534	
White, Gray, Incisal Blue 1, Incisal Blue 2, Mamelon Orange 1, Mamelon Orange 2, Cervical 1, Cervical 2, Cervical 3, Earth Brown, Reddish Brown, Salmon Pink, Red, A+, B+, C+, D+, Bright, Fluoro (各3g)	

●ISリキッド (10mL)、ISカラーガイド

エクスターナルステインキット (計22色) 表面ステイン用

注文番号	
202280540	
Pure White, Gray, Black, Blue, Green1, Green2, Yellow, Orange1, Orange2, Cervical1, Cervical2, Cervical3, Earth Brown, Reddish Brown, Salmon Pink, Pink, Red, A+, B+, C+, D+ (各3g), Glaze (10g)	

●ESリキッド (10mL)、ESカラーガイド

関連製品

AAA カラーガイド

注文番号	品名	種別
セット	202280851 コンプリート 2002	
	●内容: 222/223/224/225/226/227/228/229	
	202280856 パウダーオベーク 221	17色
	202280857 ペーストオベーク 222	23色
	202280858 ペーストオベークモディファイヤー 223	8色
	202280859 マージン 224	22色
	202280860 オペーシャスポディ 225	21色
単品	202280861 ボディ 226	25色 (AD-B含む)
	202280862 エナメル&トランスルーセント 227	15色 (CCV含む)
	202280863 ラスター 228	19色
	202280864 モディファイヤー 229	24色 (Tissue色含む)
	202280533 ISカラーガイド	18色 (Fluoro, Brightは除く)
	202280544 ESカラーガイド	21色 (Glazeは除く)

- 注文番号は株式会社モリタの商品コードです。
- 価格はメーカー希望小売価格です。掲載商品のメーカー希望小売価格は2023年7月現在のものです。メーカー希望小売価格には消費税等は含まれておりません。
- 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。 ●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。 ●仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

製品・各種技術に関するお問い合わせ

クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

0120-330-922

平日 10:00~17:00

ホームページ

www.kuraraynoritake.jp

販売先

株式会社 モリタ

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL. (06) 6380-2525

〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL. (03) 3834-6161

お客様相談センター: 0800-222-8020

http://www.dental-plaza.com

連絡先

クラレノリタケデンタル株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-4 常盤橋タワー

フリーダイヤル: 0120-330-922

製造販売元

クラレノリタケデンタル株式会社

〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

クラレノリタケデンタル公式アプリ

QRコード

Download on the App Store

Google Play

で手に入れよう

クラレノリタケデンタル

検索

サポート OS バージョン iOS 13.7 以上 / Android 9.0 以上

単品製品構成		
注文番号	品名	容量
202280093	ペーストオベーク	各6g/2.4mL
202280096	NP Bonder	6g/2.4mL
202280095	ペーストオベークモディファイヤー	各3g/1.2mL
202280210	パウダーオベーク	各10g
202280280	パウダーオベーク OS	10g
202280300	マージン	各10g
202280451	オペーシャスポディ	各10g
202280452		各50g
202280270		各10g
202280271	サービカル	各50g
202280220		各10g
202280221	ボディ	各50g
202280222		各200g
202280230	エナメル E1, E2, E3, Silky E1, Silky E2	各10g
202280231		各50g
202280232	エナメル E2, E3	各200g
202280240		各10g
202280241	トランスルーセント	各50g
202280242		各200g
202280551	ラスター	各10g
202280552		各50g
202280270	クリアサービカル	各10g
202280320	ティッシュ	各10g
202280250	モディファイヤー	各10g
202280310	マメロン	各10g
202280290	アドオン	各10g
202280531	インターナルステイン	各3g
202280541	エクスターナルステイン	各3g
202280542	エクスターナルステイン Glaze	10g
202280523	アドメイト	各10g

リキッド		
注文番号	品名	容量
202280420	フォーミングリキッド	100mL
	●ノリタケ スーパーポーセレン AAA 歯冠色用の練液です。	
202280522	アドメイト フォーミングリキッド	10mL
202280209	オーベクリキッド	100mL
	●ノリタケ スーパーポーセレン AAA 歯冠色用/パウダーオベーク用の練液です。	
202280446	ペーストオーベクリキッド	10mL
202280532	IS リキッド (共用)	10mL
	●インターナルステイン(内部ステイン)用のリキッドです。	
202280543	ES リキッド (共用)	10mL
	●エクスターナルステイン(表面ステイン)用のリキッドです。	
202280650	マイスターリキッド	100mL
	●ウェット感が持続する練液です。	

ノリベスト

一般医療機器 歯科用高温模型材
医療機器届出番号: 15B1X10001304101

注文番号	品名	容量
セット	202050603	
	●内容: 粉末 (30g×33個)、液 (200mL)、シリンジ×1本	
単品	202050604	30g×33個
	202050605	液 200mL

●「ノリタケスーパーポーセレンAAA」の熱膨張に合わせた高温用模型材(耐火模型材)です。

●ポーセレンラミネートベニア、インレー、ジャケットクラウンなどの製作に使用できます。