

管理医療機器 歯科用陶材


セラビアン[®]ZR

CERABIEN[®]
ZR



トランスルーセント・ラスター


エナメル質層の色調表現の幅を広げるために、トランスルーセントとラスターに色調を追加しました。

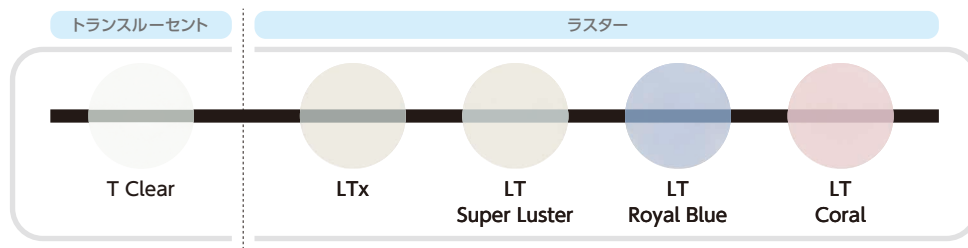

Point 1

高い透光性

T clearは、Txよりも高い透光性を有し、透光性の高い色調を表現することができます。

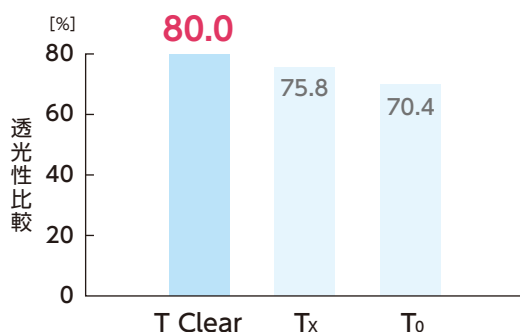


<測定条件>
光源: D65 試験片: Φ16, 1.2mm厚
測定: クラレノリタケデンタル (株)

Point 2

強いオパール性

LTxは、LT0よりも高い透光性と強いオパール性を有し、切端の透明感を強調したい場合に使用できます。また、LT Super Lusterは、ラスターの中で最も強いオパール性を有し、光拡散効果により明るい色調を表現することができます。

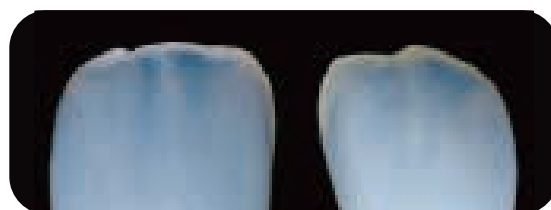


● 反射光における色調

左 LTx、右 LT Super Luster のパウダーのみを使用し、歯の形態を模倣したサンプル

使用例

写真提供: 大谷歯科クリニック 柴 隆三 先生・湯浅 直人 先生


1 内部構造の築盛

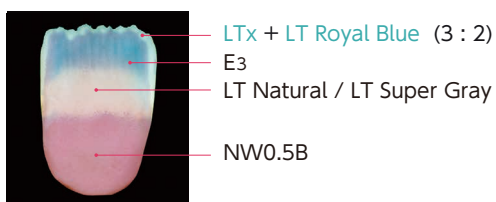


2 1次インターナルステインの塗布、焼成




3 1次エナメル質構造の築盛、焼成

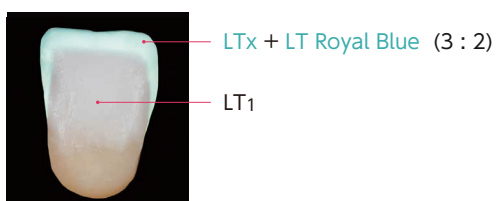

4 2次インターナルステインの塗布、焼成

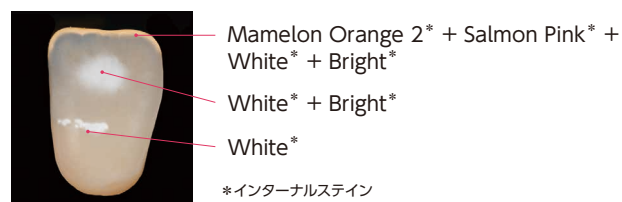

5 2次エナメル質構造の築盛、焼成

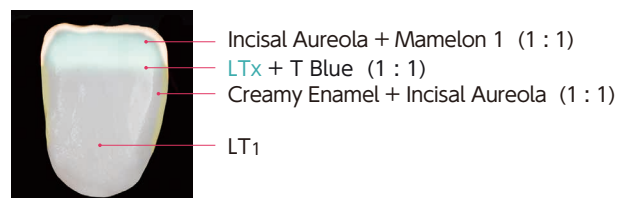


6 口腔内装着



シェードベース

金属支台歯や変色支台歯の色の遮蔽、また歯肉部などのジルコニアフレームの色調調整のために、シェードベースにオパーク色※1を追加しました。 ※1 下記5色を示します。

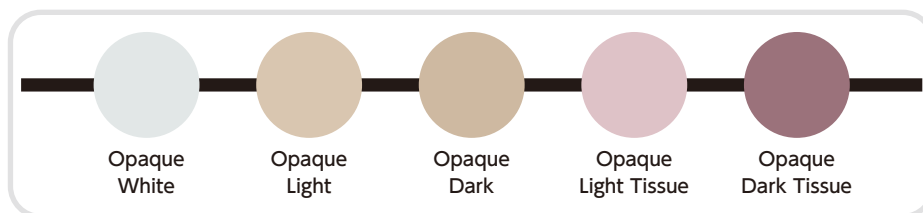


Point 1

薄い築盛で高い遮蔽性

従来のシェードベースと比較して約5倍※2の遮蔽力があるため、薄い築盛で金属支台歯や変色支台歯の色を遮蔽することができます。

※2 透過率：
「セラビアン® ZR」シェードベース オパーク色 : 約2%
「セラビアン® ZR」シェードベース 既存色 : 約10%


● 遮蔽性比較

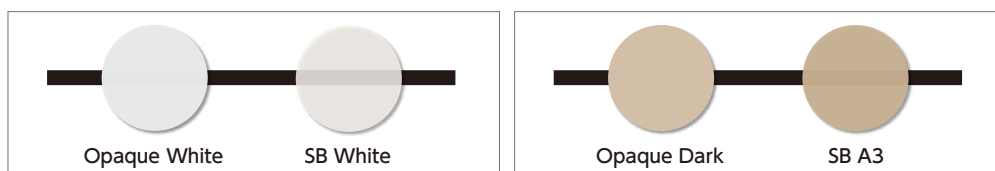

(測定条件) X-Rite社製白黒透過濃度計、試験片厚み: 0.3mm クラレノリタケデンタル(株) 測定: 条件により数値は異なります。

● 金属支台歯の遮蔽性

HT10: 「ノリタケ カタナ® ジルコニア」HT10

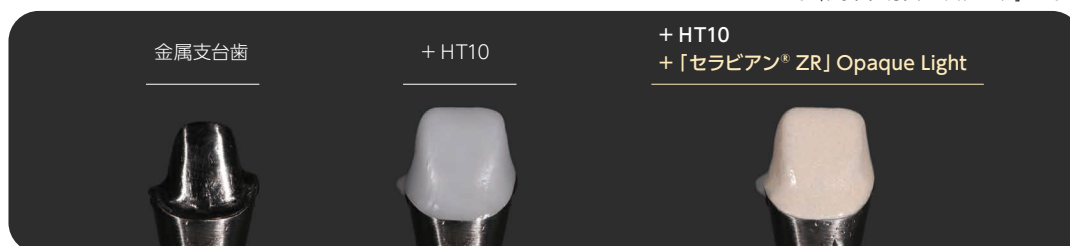

Point 2

歯肉部に生命感を付与



より生命感のある
健康的な歯肉の色に！

使用母材: 「ノリタケ カタナ® ジルコニア」YML A2
仕上げ: 歯冠部位: 「セラビアン® ZR」FCベースステイン
A+, Cervical 1, Cervical 2, Clear Glaze
歯肉部位: 「セラビアン® ZR」ティッシュ
Tissue 2, Tissue 6, Tissue 7

使用例 ※3



※3 注意事項等情報(電子添文等)記載の使用用途「ジルコニアフレームを使用した修復物」における例です。詳しい使用方法は、注意事項等情報(電子添文等)をご確認ください。

各10g 202280607




各10g 202280611 / 50g 202280612 (CV-1のみ)

各10g 202280609 / 各50g 202280610

各10g 202280613 / 各50g 202280614


各10g 202280615 / 各50g 202280616

各10g 202280617 / 各50g 202280618

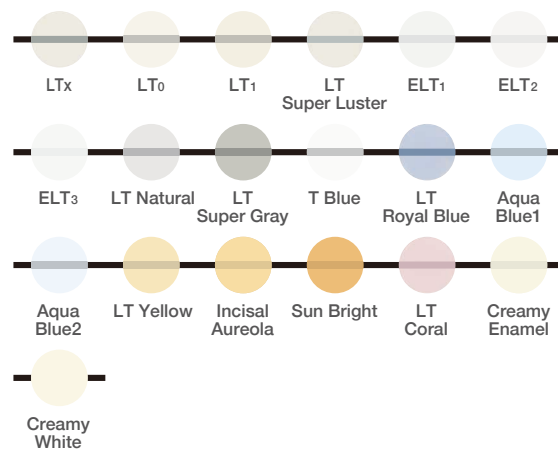

クリアサービカル

各10g 202280611

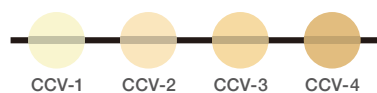


マメロン

各10g 202280619




ティッシュ

各10g 202280644

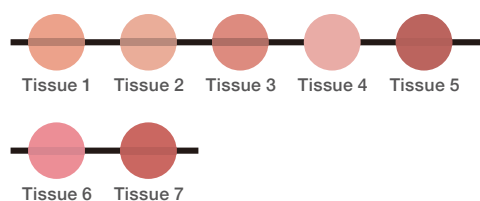


モディファイヤー

各10g 202280619

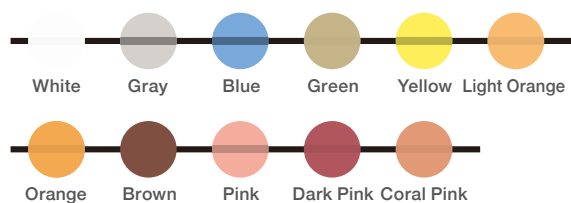

アドオン

各10g 202280621 / 各50g 202280622

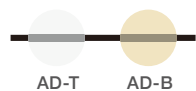

インターナルステイン

各3g 202280627



エクスターナルステイン

各3g 202280629 / 各10g 202280630 (Glaze, E Glazeのみ)



FCペーストステイン

各3g 202280646 / 各5g 202280647 (Glaze, Clear Glazeのみ)



■ エナメル/トランスルーセントキット (計10色)

注文番号
202280656
E ₁ , E ₂ , E ₃ , Silky E ₁ , Silky E ₂ T Clear, T _x , T ₀ , T ₁ , T ₂ (各10g)

■ FCペーストステインキット (計27色)

注文番号
202280645
White, Value, Light Gray, Dark Gray Black, Grayish Blue, Blue, Green1, Green2, Yellow Mamelon Orange1, Mamelon Orange2, Cervical1 Cervical2, Cervical3, Earth Brown, Reddish Brown Salmon Pink, Pink, Red, A ⁺ , B ⁺ , C ⁺ , D ⁺ Fluoro (各3g), Glaze, Clear Glaze (各5g)
●ESリキッド(10mL), FCペーストステインカラーガイド

■ エクスターナルステインキット (計22色)

注文番号
202280628
Pure White, Gray, Black, Blue, Green1 Green2, Yellow, Orange1, Orange2 Cervical1, Cervical2, Cervical3, Earth Brown Reddish Brown, Salmon Pink, Pink, Red A ⁺ , B ⁺ , C ⁺ , D ⁺ (各3g), Glaze (10g)
●ESリキッド(10mL), ESカラーガイド

■ アソートメントキット (計18色)

注文番号
202280633
シェードベース SBA ₁ , SBA ₂ , SBA ₃ (各10g)
オペーシャスボディ OBA ₁ , OBA ₂ , OBA ₃ (各10g)
ボディ A+B, A ₂ B, A ₃ B (各10g)
エナメル E ₂ , E ₃ (各10g)
トランスルーセント T _x , T ₁ (各10g)
ラスター LT ₁ , Creamy Enamel (各10g)
サービカル CV-1 (10g)
アドオン AD-T, AD-B (各10g)

■ ラスターコンプリートキット (計19色)

注文番号
202280657
LT _x , LT ₀ , LT ₁ , LT Super Luster, ELT ₁ , ELT ₂ , ELT ₃ LT Natural, LT Super Gray, T Blue, LT Royal Blue Aqua Blue 1, Aqua Blue 2, LT Yellow Incisal Aureola, Sun Bright, LT Coral Creamy Enamel, Creamy White (各10g)

■ FCペーストステインベーシックキット (計9色)

注文番号
202280651
White, Dark Gray, Grayish Blue, Cervical2 Earth Brown, Salmon Pink, A ⁺ (各3g) Clear Glaze (5g)
●ESリキッド(10mL), FCペーストステインカラーガイド

■ インターナルステインコンプリートキット (計19色)

注文番号
202280655
White, Gray, Incisal Blue1, Incisal Blue2 Mamelon Orange1, Mamelon Orange2 Cervical1, Cervical2, Cervical3, Earth Brown Reddish Brown, Salmon Pink, Red A ⁺ , B ⁺ , C ⁺ , D ⁺ , Bright, Fluoro (各3g)
●ISリキッド(10mL), ISカラーガイド

■ リキッド製品

注文番号	品名	容量
202280649	セラビアン®ZR フォーミングリキッド ●セラビアン®ZR歯冠色用の練和液です。	100mL
202280532	IS リキッド(共用) ●インターナルステイン(内部ステイン)用の練和液です。	10mL
202280543	ES リキッド(共用) ●エクスターナルステイン(表面ステイン)用の練和液です。	10mL
202280650	マイスターリキッド ●ウェット感が持続する練和液です。	100mL

■ セラビアン®ZR 単品製品構成

注文番号	品名	容量
202280646	FCペーストステイン	各3g
202280647		各5g
202280607	シェードベース	各10g
202280623	マージン	各10g
202280624	オペーシャスボディ	各10g
202280625		各50g
202280611	サービカル	各10g
202280612		各50g
202280609	ボディ	各10g
202280610		各50g
202280613	エナメル	各10g
202280614		各50g
202280615	トランスルーセント	各10g
202280616		各50g
202280617	ラスター	各10g
202280618		各50g
202280611	クリアサービカル	各10g
202280619	モディファイヤー/マメロン	各10g
202280644	ディッシュ	各10g
202280621	アドオン	各10g
202280622		各50g
202280627	インターナルステイン	各3g
202280629	エクスターナルステイン	各3g
202280630		各10g

製品の電子添文はこちら
◎医薬品医療機器総合機構



カラーガイド



■ セット

注文番号	品名
202280853	コンプリート 4003
内容:	431/422/423/424/425/426/427

■ 単品

注文番号	品名	種別
202280872	シェードベース 431	26色
202280873	マージン 422	21色
202280874	オペーシャスボディ 423	22色
202280875	ボディ 424	25色
202280876	エナメル&トランスルーセント 425	15色
202280877	ラスター 426	19色
202280878	モディファイヤー 427	24色

■ 単品

注文番号	品名	種別
202280648	FCペーストステイン カラーガイド	27色
202280533	ISカラーガイド	18色 (Fluoro, Brightは除く)
202280544	ESカラーガイド	21色 (Glazeは除く)

●データは全てクラレノリタケデンタル株式会社測定です。条件などにより数値は異なります。●印刷のため実際の色調と異なる場合があります。●ご使用に際しましては、製品の電子添文等を必ずお読みください。
●仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
ノリタケ カタナ® シルクニア 管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス 医療機器認証番号：223AFBZX00185000

製品・各種技術に関するお問い合わせ

クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

0120-330-922
平日 10:00～17:00

ホームページ

www.kuraraynoritake.jp

連絡先 **クラレノリタケデンタル株式会社**

〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー

製造販売元 **クラレノリタケデンタル株式会社**

〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

販売元 **株式会社 モリタ**

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL. (06) 6380-2525

〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL. (03) 3834-6161

お客様相談センター：0800-222-8020 (医療従事者様向け窓口)

https://www.dental-plaza.com

クラレノリタケデンタル公式アプリ



クラレノリタケデンタル

検索

推奨 OS バージョン iOS13.7 以上 / Android9.0 以上