



大白歯I級窩洞にフロアブルレジンを用いた修復治療

崩壊量が大きく窩洞が深い大白歯I級窩洞へ直接充填を行う際、彩度と明度のコントロールが重要である。また、隆線や咬頭を再現するには使用するレジンの流動性もポイントとなってくる。そこで「クリアフィル® マジェスティ® ES フロー」の異なるシェードと異なるフロー性を用いた症例を紹介する。近年普及しているユニバーサルタイプの色調だが彩度を高めるUD色、明度を高めるUW色があり、フロー性もHigh・Low・Super Lowの3種類を有している為、シンプルな組み合わせによる高い色調表現が可能である。



大阪府開業
やすみつ歯科クリニック
安光 崇洋 先生



術前：咬合面に局限したI級窩洞、近心に古い充填物を確認



術前：カリエス除去



接着処理：「クリアフィル® メガボンド® 2」を用いて確実な接着を行う



充填：窩底部にはHigh Universal UD色を用いてライニング



充填：中心窩から各咬頭に向かってSuper Low Universal U色で賦形



充填：Super Low Universal U色を用いて賦形後



充填：Low Universal UW色を隆線に用いることで咬頭のコントラストを表現



術後：充填後1週間後の口腔内、保険診療における充填として十分な色調表現が可能となった

- クリアフィル® マジェスティ® ES フロー 管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン 医療機器認証番号：224ABBZX00170000
- クリアフィル® メガボンド® 2 管理医療機器 歯科用象牙質接着材料 (歯科セラミックス用接着材料) (歯科金属用接着材料) (歯科用知覚過敏抑制材料) 医療機器認証番号：227ABBZX00114000
- 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。 ●ご使用に際しましては、製品の電子添文等を必ずお読みください。

製品・各種技術に関するお問い合わせ

クラレノリタケデンタルインフォメーションダイヤル

 **0120-330-922**

平日 10:00～17:00

ホームページ

www.kuraraynoritake.jp

連絡先

クラレノリタケデンタル株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー

製造販売元

クラレノリタケデンタル株式会社

〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

販売元

株式会社モリタ

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL. (06) 6380-2525
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL. (03) 3834-6161
お客様相談センター：0800-222-8020 (医療従事者様向窓口)
<https://www.dental-plaza.com>