


クリアフィル[®]
ユニバーサルボンド Quick 2

1 窩洞形成・防湿・歯髄保護・ 充填準備

感染象牙質の除去のためにう蝕検知液
(カリエステクター)が有効です。

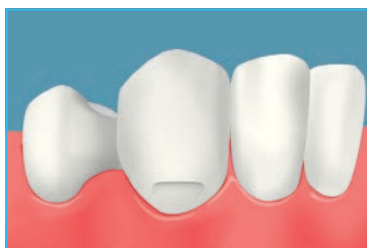

2 ボンド塗布

待ち時間なしで 3 へ



3 乾燥

マイルドなエアブローで5秒以上乾燥 ※1

5秒以上乾燥



4 光照射



ボンドへの照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	10秒

「ペンキュアー 2000」の
高出力モードの場合は3秒、
標準モードは10秒
(製造販売元:株式会社 モリタ製作所)

光量についてはP.1を参照ください。

5 光重合型CRの処理 ※2



関連商品

●う蝕検知液

①カリエステクター
(製造:クラレノリタケデンタル株式会社)

●コンポジットレジン

②クリアフィル[®] マジェスティ[®] ESフロー Universal
③クリアフィル[®] マジェスティ[®] ES-2

※製品画像に付与された番号を参照ください。

POINT

※1 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。

※2 ご使用の光重合型CRの電子添文等をご参照ください。