

口腔内リペア【歯質を含む場合】

(例えば、金属・陶材・コンポジットレジン)



クリアフィル® ポーセレンボンド
アクティベーター



クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick 2

1 被着面の粗造化、水洗、乾燥



2 リン酸処理、5秒後水洗、乾燥



3 ボンドと「クリアフィル® ポーセレンボンド アクティベーター」の混和液※1,2 塗布



4 乾燥

マイルドなエアブローで5秒以上乾燥※3



5 光照射



ボンドへの照射器と照射時間の関係


分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

「ペンキュアー 2000」の
高出力モードの場合は3秒、
標準モードは10秒
(製造販売元: 株式会社 モリタ製作所)

光量についてはP.1を参照ください。

6 光重合型CRの充填、光照射、研磨※4

メタル部のマスキングには「クリアフィル®
ST オペーカー」をご使用ください。

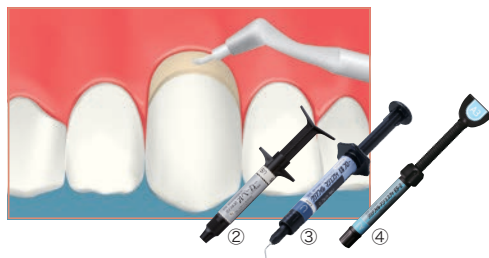

関連商品

- 歯科用エッチング材
 - ① K エッチャント シリンジ
- コンポジットレジン
 - ② クリアフィル® ST オペーカー
 - ③ クリアフィル® マジェスティ® ESフロア Universal
 - ④ クリアフィル® マジェスティ® ES-2

※製品画像に付与された番号を参照ください。

POINT

- ※1 粗造化が困難な貴金属面に対しては、「アロイ プライマー」を電子添文等にしたい塗布、乾燥した後にボンドと「クリアフィル® ポーセレンボンド アクティベーター」の混和液を塗布してください。
- ※2 1滴ずつ等量混和してください。
- ※3 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。
- ※4 ご使用の色調遮蔽材料、光重合型CRの電子添文等をご参照ください。

本術式は「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」電子添文等に記載の「光重合型の歯科充填用コンポジットレジンによる前装冠等の歯冠修復物の補修」を示します。