


# 11 知覚過敏の処置




クリアフィル®  
ユニバーサルボンド Quick 2

## 1 患部の診察・歯面清掃・防湿 患部全体にボンド塗布

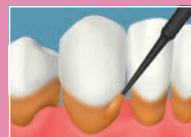

## 2 乾燥(弱～中圧)

マイルドなエアブローで液面が  
動かなくなるまで乾燥※

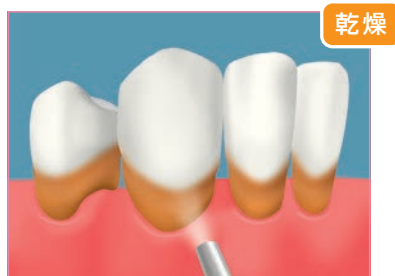

## 3 光照射




ボンドへの照射器と照射時間の関係

| 分類        | 照射時間 |
|-----------|------|
| 高出力LED照射器 | 5秒   |
| LED照射器    | 10秒  |
| ハロゲン照射器   |      |

「ペンキュアー 2000」の  
高出力モードの場合は3秒、  
標準モードは10秒  
(製造販売元:株式会社 モリタ製作所)

光量についてはP.1を参照ください。

## 4 未重合層の除去

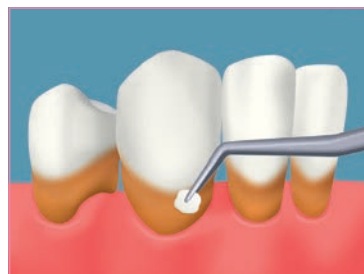

**POINT** ※ バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。

本術式は「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」電子添文等に記載の「知覚過敏の処置」を示します。