



クリアフィル®  
ユニバーサルボンド Quick 2

## 1 窩洞形成・防湿・歯髄保護・ 充填準備

感染象牙質の除去のためにう蝕検知液  
(カリエステクター)が有効です。



## 2 ボンド塗布

待ち時間なしで **3** へ



## 3 乾燥

マイルドなエアブローで5秒以上乾燥※1

**5秒以上乾燥**



## 4 光照射



ボンドへの照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

「ペンキュアー 2000」の  
高出力モードの場合は3秒、  
標準モードは10秒  
(製造販売元:株式会社 モリタ製作所)

光量についてはP.2を参照ください。

## 5 光重合型CRの処理※2



関連商品

- う蝕検知液
- ①カリエステクター  
(製造:クラレノリタケデンタル株式会社)
- コンポジットレジン
- ②クリアフィル® マジェスティ® ESフロアー Universal
- ③クリアフィル® マジェスティ® ES-2

※製品画像に付与された番号を参照ください。

### POINT

- ※1 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。
- ※2 ご使用の光重合型CRの電子添文等をご参照ください。