

7-1 レジンコアの接着



パナビア® V5

通法にしたがい、根管形成及び、根管充填を行った後、
築造窩洞の形成、コアの試適等を行ってください。

1 レジンコアの表面処理

① サンドブラスト
処理※1、超音波
洗浄・乾燥


② 「K エッチャント
シリンジ」塗布、
5秒後水洗・乾燥

5秒間処理

③ シラン処理「クリアフィ
ル®セラミックプライ
マー プラス」塗布
エアブローで乾燥

待ち時間なしで
エアブロー

2 「パナビア® V5トゥース プライマー」 塗布、20秒処理後乾燥 ※2

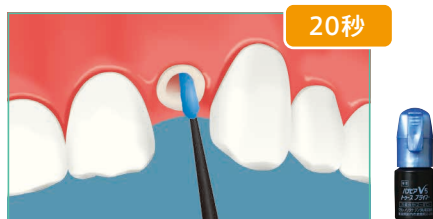

3 コアの被着面または築造 窩洞内へペーストを注入



築造窩洞内へ注入した
場合は60秒以内に **4** へ

4 レジンコアの装着※3、余剰セメント除去

光照射で半硬化させる
除去法

① 余剰セメントに1ヶ所につ
き3～5秒光照射

3～5秒
オーバー

② 探針等で除去

又は
小筆による除去法

余剰セメントを小筆等
で除去

5 マージン部に光照射 ※4



オーバーの場合はさらに3分保持


照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。

6 支台歯形成

6分保持し形成

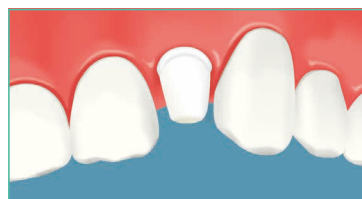

POINT

- ※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の電子添文等にしたがってください。
- ※2 余剰のプライマーをペーパーポイント等で吸い取った後、エアブローで乾燥してください。
- ※3 気泡の混入にご注意ください。
- ※4 1回の光照射で、光硬化させる部位全てが照射径に入らない場合は、光照射を繰り返して全ての部位に対して光照射を行ってください。