

15-1 知覚過敏の処置



クリアフィル®
メガボンド® 2

直接充填

セメンテーション

支台築造

リベア

知覚過敏の処置

歯面コーティング

- 1 患部の診察・歯面清掃・防湿
患部全体にプライマー塗布
20秒間処理**



- 2 乾燥(弱～中圧)**
マイルドなエアブローで5秒以上乾燥※



- 3 ボンド塗布**



- 4 乾燥**
マイルドなエアブローで均一に



- 5 光照射**



ボンドへの照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

「ベンキュアー 2000」の
高出力モードの場合は3秒、
標準モードは10秒
(製造販売元:株式会社 モリタ製作所)

光量についてはP.2を参照ください。

- 6 未重合層の除去**



POINT ※ バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。

本術式は「クリアフィル® メガボンド® 2」電子添文等記載の「知覚過敏歯の処置」を示します。