

15-2 知覚過敏の処置



クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick 2

1 患部の診察・歯面清掃・防湿 患部全体にボンド塗布



2 乾燥(弱～中圧)

マイルドなエアブローで液面が動かなくなるまで乾燥※



3 光照射




ボンドへの照射器と照射時間の関係

分類	照射時間	「ペンキュアー 2000」の 高出力モードの場合は3秒、 標準モードは10秒 (製造販売元:株式会社 モリタ製作所)
高出力LED照射器	5秒	
LED照射器	10秒	
ハロゲン照射器		

光量についてはP.2を参照ください。

4 未重合層の除去

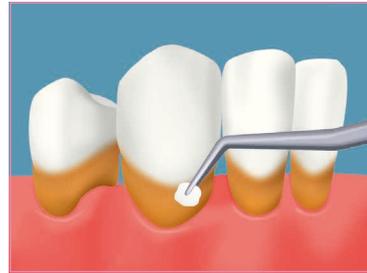

直接充填

セメンテーション

支台築造

リペア

知覚過敏の処置

歯面コーティング

POINT ※ バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。

本術式は「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」電子添文等に記載の「知覚過敏の処置」を示します。