

各種処置後のしみ止め

(機械的歯面清掃、スケーリング、ルートプレーニング後、漂白処置後の歯面の処置)



ティースメイト®
APペースト

1 患部の診察・歯面清掃・ペースト採取



4 効果の確認^{※2}



乾燥の必要なし

2 ペーストの擦り塗り

1歯あたり20秒以上こすり塗り



3 水洗^{※1}



POINT

- ※1 余剰ペーストを水洗又はうがい等で取り除きます。
- ※2 症状が消滅していない場合は再度ペーストを擦り塗ります。