

管理医療機器 歯科用象牙質接着材

クリアファイル® DC ボンド

Dual Cure Bonding system

デュアルキュアのボンディングが
1ステップに



デュアルキュア型ボンディングの操作性をよりシンプルに！

ボンドA液、ボンドB液の等量混和により、1ステップで接着処理が可能なデュアルキュア型ボンド（光・化学重合型）です。

※必ずボンドA液・ボンドB液を混和してご使用ください。ボンドA液は粘性があり、ボンドB液はサラッとした液性です。採取の際は採取性の違いにご注意ください。



「クリアフィル® DCボンド」の使用ステップ概要

※ご使用前には必ず製品の添付文書をお読みください。

case A レジンコアに 歯科用支台築造材料を用いた支台築造 ※添付文章に従って築造窩洞形成、防湿、充填準備を行ってください。

- 1 歯科用ボンドの表面処理方法**
金属ボンドの場合
「アロイプライマー」の塗布、エアブロー
ガラスファイバーボンドの場合
リン酸エッチング材処理後、「クリアフィル® セラミックプライマー」の塗布、エアブロー
- 2 ボンドA液・B液の混和・塗布**
※遮光下で保管し、90秒以内に使用してください。
20秒放置
※放置中はデンタルライトの光量を下げてください。
- 3 強めのエアブローでしっかりと乾燥**
5秒以上
- 4 余剰ボンドを除去**
- 5 再度強めのエアブローでしっかりと乾燥**
5秒以上
- 6 光照射**
※照射器と照射時間の関係については表1をご参照ください。
- 7 支台築造用CRの填入・ボンドの固定**
- 8 支台築造用CRの築盛・支台歯形成**

case B 光重合 CR に 光重合型の歯科充填用コンポジットレジンを用いた充填修復 ※添付文章に従って窩洞形成、防湿、歯髄保護、充填準備を行ってください。


- 1 ボンドA液・B液の混和・塗布**
※遮光下で保管し、90秒以内に使用してください。
20秒放置
※放置中はデンタルライトの光量を下げてください。
- 2 強めのエアブローでしっかりと乾燥**
5秒以上
- 3 光照射**
※照射器と照射時間の関係については表1をご参照ください。
- 4 光重合型CRの充填**
- 5 光照射**
※照射時間は光重合型CRの添付文章に従ってください。

case C 化学重合 CR に 化学重合型の歯科充填用コンポジットレジンを用いた充填修復 ※添付文章に従って窩洞形成、防湿、歯髄保護、充填準備を行ってください。

- 1 ボンドA液・B液の混和**
※遮光下で保管し、90秒以内に使用してください。
5秒以上混和
- 2 ボンドの塗布**
20秒放置
- 3 強めのエアブローでしっかりと乾燥**
5秒以上
- 4 光照射**
※照射器と照射時間の関係については表1をご参照ください。
- 5 化学重合型CRの練和・充填・硬化・仕上げ研磨**

接着強さと照射時間

■「クリアフィル® AP-X」との接着強さ (MPa)

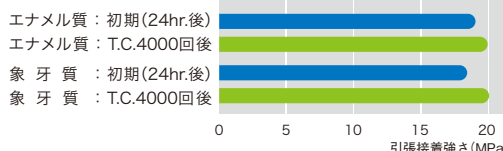

<測定条件>
ISO/TS 11405に準ずる
被着面積：3mmφ
照射器：ジェットライト
照射時間：ボンド 10秒間光照射
CR 20秒間光照射
接着対象CR：「クリアフィル® AP-X」
クラレノリタケデンタル(株)測定
弊社測定データ：条件などにより数値が異なります。

■表1「クリアフィル® DCボンド」の照射時間について

歯科重合用照射器	歯科用支台築造材料を用いた支台築造	その他の症例
従来型ハロゲン照射器、LED照射器	20秒間光照射	10秒間光照射
高出力ハロゲン照射器、プラズマーク照射器	10秒間光照射	5秒間光照射

使用可能な照射器については、添付文書をご参照ください。

管理医療機器 歯科用象牙質接着材料 クリアフィル® DCボンド

セット
ボンドA液(4mL)×1本、
ボンドB液(4mL)×1本、
付属品
(遮光板(B)×1個、混和皿(B)×1個、スポンジ小片(NL)×1箱)
メーカー希望小売価格：17,000円 242-510

単品
・ボンドA液(4mL)×1本
メーカー希望小売価格：9,000円 242-512
・ボンドB液(4mL)×1本
メーカー希望小売価格：9,000円 242-513
●医療機器認証番号：218ABBZX00039000

管理医療機器 歯科用支台築造材料 クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE キット

セット(ホワイト、又はデンチン)
クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE
Aベスト 8.9g (4.5mL) + Bベスト 9.0g (4.5mL) ×1本
クリアフィル® ボンド SE ONE
ボンド (1mL) ×1本
付属品(ホワイト、デンチン共通)
ミキシングチップ×20個、ガイドチップ(太)×10個、
ガイドチップ(細) 10個、アプリケーターブラシ(根管用(黒))×50本、
遮光板(C)×1個、混和皿(C)×1個、
メーカー希望小売価格：17,000円 242940-941
●医療機器認証番号：223ABBZX00087000
クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE キットはクリアフィル® DCコア オートミックス® ONE と
クリアフィル® ボンド SE ONE (少量タイプのボンド：1mL)のキットです。

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料 クリアフィル® セラミック プライマー

単品
4mL
メーカー希望小売価格 7,000円 242-550
●医療機器認証番号：218ABBZX00041000

- メーカー希望小売価格の後の6ケタの数字は株式会社モリタの商品コードです。
- 掲載商品のメーカー希望小売価格は2012年4月現在のものです。メーカー希望小売価格には消費税等は含まれておりません。
- 印刷のため、現品と色調が異なることがあります。
- 仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承下さい。
- 出典のない測定データはクラレノリタケデンタル株式会社によるものです。
- ご使用に際しましては添付文書を必ずお読み下さい。

製品・各種技術に関するお問い合わせ

》クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

0120-330-922 月曜～金曜 10:00～17:00 www.kuraraynoritake.jp

製造販売元 **クラレノリタケデンタル株式会社**
〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

連絡先 **クラレノリタケデンタル株式会社**
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3(大手センタービル)
フリーダイヤル：0120-330-922

販売元 **株式会社モリタ**
〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL.(06)6380-2525
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL.(03)3834-6161
http://www.dental-plaza.com