




管理医療機器  
歯科用象牙質接着材

**クリアフィル® DC ボンド**

# 使用上のご注意 （ご使用前に必ずお読みください）

## ◆ ボンディング処理の際のご注意

- 歯面への塗布時、及び20秒間放置時に、デンタルライトが当たると光硬化（ゲル化）する場合があります。ボンディング処理中は、口腔内へのデンタルライトの角度や距離を調整するなど光量を下げる回避処置を行ってください。また、歯面処理後は可及的速やかにエアブローを行ってください。

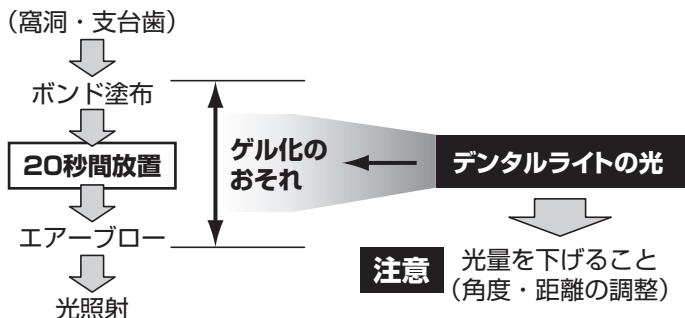

ご使用前には、必ず添付文書をお読みください。

「クリアフィル® DC ボンド」に関するお問い合わせ先

製造販売元 **クラレハリタケ デンタル株式会社**  
〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28  
フリーダイヤル：0120-330922

販売元 **株式会社モリタ**  
〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18  
TEL (06) 6380-2525  
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15  
TEL (03) 3834-6161