



取扱説明書

フローチャートシート

管理医療機器


歯科用象牙質接着材（歯科セラミックス用接着材料）（歯科金属用接着材料）

クラレノリタケデンタル株式会社

クリアフィル®トライエスポンド ND クイック

光重合型の歯科充填用コンポジットレジンによる充填修復

通法にしたがって窩洞形成、防湿、歯髄保護を行ってください。

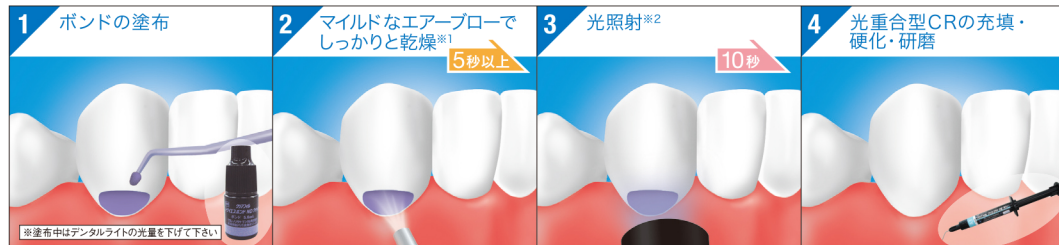

※1 エアブローの方法について

バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまでしっかりと乾燥させてください。

※2 照射時間について

照射時間は以下のとおりです。

分類	光源	光量	照射時間
ハロゲン照射器	ハロゲンランプ	400 mW/cm ² 以上	10 秒
LED照射器	青色LED	800~1400 mW/cm ²	10 秒
高出力LED照射器	青色LED	1500 mW/cm ² 以上	3 秒

ご使用前には、必ず本品及び関連材料の添付文書をお読みください。

「クリアフィル®トライエスポンド ND クイック」に関するお問い合わせ先

製造販売元 **クラレノリタケデンタル株式会社**

〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

フリーダイヤル：0120-330922

販売元 **株式会社モリタ**

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL(06)6380-2525

〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL(03)3834-6161