

使用用途別 早わかりフローチャート

クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick 2



CR充填

セメンテーション

ADVANCED
RAPID BOND
TECHNOLOGY

支台築造

象牙質
レジンコーティング

WEBからも
ご覧いただけます。



ご使用の前には、必ず製品の電子添文等に記載の
使用方法・注意事項をお読みください。

目次

直接充填	1 光重合型コンポジットレジンの充填 P3
セメンテーション	2 CAD/CAMレジン冠の接着 P4 3 ジルコニアクラウンの接着 P5 4 インプラントアバットメントへの補綴装置の接着 P6 5 金属冠、前装冠の接着 P7 6 レジンコアの接着 P8
支台築造	7 直接法レジンコア【ファイバーポスト】 P9 8 直接法レジンコア【金属ポスト】 P10
リペア	9 口腔内リペア【歯質を含む場合】 P11 10 口腔内リペア【歯質を含まない場合】 P12
知覚過敏の処置	11 知覚過敏の処置 P13
歯面コーティング	12 象牙質レジンコーティング P14

○照射器の分類と光量の関係について、特に記載のない場合は以下の表を参照ください。

分類	光量
高出力LED照射器	1500mW/cm ² 以上
LED照射器	800～1400mW/cm ²
ハロゲン照射器	400mW/cm ² 以上

光量について使用する各照射器の電子添文等をご確認ください。

「クリアフィル」、「マジェスティ」、「SA ルーティング」及び「オートミックス」は株式会社クラレの登録商標です。

管理医療機器 歯科用象牙質接着材

(歯科セラミックス用接着材料)(歯科金属用接着材料)(歯科用知覚過敏抑制材料)(歯科用シーリング・コーティング材)

医療機器認証番号：305ABBZX0012000

クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick 2



ADVANCED RAPID BOND TECHNOLOGY

「塗布後の待ち時間なし」と「高接着」「強固なボンディング層」を両立する独自技術を採用。



単品 ボンド (5mL)

Wパック ボンド (5mL) × 2個

製品の詳細については
WEBからご確認ください
だけです。



管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン

クリアフィル®マジエスティ®ESフロー- Universal

医療機器認証番号：224ABBZX00170000

単品

- ・レジン充填材(各2.7g/1.5mL)
- ・付属品 ニードルチップ(N)(5個)
- ニードルチップキャップ(5個)



3本パック LOW(U)

- ・レジン充填材(各2.7g/1.5mL)…3本
- ・付属品 ニードルチップ(N)(5個)
- ニードルチップキャップ(5個)



詳しくはこちら ▶



管理医療機器 歯科用支台築造材料

クリアフィル®DCコアオートミックス®ONE

医療機器認証番号：223ABBZX00086000

単品

- デンチン/ホワイト
- Aペースト (8.9g/4.5mL) /
- Bペースト (9.0g/4.5mL)…1本
- ・付属品
- ミキシングチップ…20個、ガイドチップ(太)…10個
- ガイドチップ(細)…10個



3本パック デンチン

- Aペースト (8.9g/4.5mL) /
- Bペースト (9.0g/4.5mL)…3本
- ・付属品
- ミキシングチップ…20個、ガイドチップ(太)…10個
- ガイドチップ(細)…10個



詳しくはこちら ▶



管理医療機器 歯科接着用レジンセメント

SA ルーティング® Multi

医療機器認証番号：230ABBZX00096000

オートミックス

単品

- ユニバーサル/ホワイト /
- トランスルーセント
- ・Aペースト / Bペースト (8.2g/4.6mL)…1本
- ・付属品
- ミキシングチップ(合着用)…20個

セット品

- ユニバーサル
- バリューキット
- ・Aペースト / Bペースト(8.2g/4.6mL)…3本
- ・付属品
- ミキシングチップ(合着用)…40個
- ミキシングチップ(エンド用)…10個
- ガイドチップ(エンド用極細)…10個



単品

ハンドミックス

単品

- ユニバーサル/ホワイト /
- トランスルーセント
- ・Aペースト / Bペースト (9.2g/5mL)…1本

セット品


- ユニバーサル
- バリューキット
- ・Aペースト / Bペースト(9.2g/5mL)…3本
- ・付属品
- 練和棒(PN)…1本
- 練和紙(目盛付)…1個



セット品

詳しくはこちら ▶




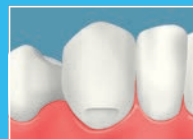

クリアフィル[®]
ユニバーサルボンド Quick 2

1 窩洞形成・防湿・歯髄保護・ 充填準備

感染象牙質の除去のためにう蝕検知液
(カリエステクター)が有効です。

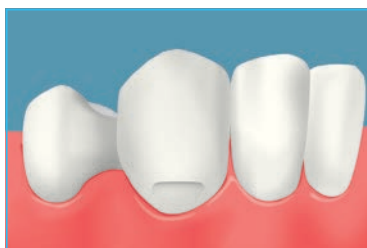

2 ボンド塗布

待ち時間なしで 3 へ



3 乾燥

マイルドなエアブローで5秒以上乾燥 ※1

5秒以上乾燥



4 光照射



ボンドへの照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	10秒

「ペンキュアー 2000」の
高出力モードの場合は3秒、
標準モードは10秒
(製造販売元:株式会社 モリタ製作所)

光量についてはP.1を参照ください。

5 光重合型CRの処理 ※2



関連商品

●う蝕検知液

①カリエステクター
(製造:クラレノリタケデンタル株式会社)

●コンポジットレジン


②クリアフィル[®] マジェスティ[®] ESフロー Universal
③クリアフィル[®] マジェスティ[®] ES-2

※製品画像に付与された番号を参照ください。

POINT

※1 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。

※2 ご使用の光重合型CRの電子添文等をご参照ください。

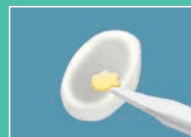

通法にしたがい仮着材・仮封材除去、窩洞・支台歯の清掃、防湿等を行ってください。



クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick 2



SA ルーティング®
Multi

直接充填

セメント接着

支台築造

リペア

知覚過敏の処置

歯面コーティング

1 試適後、 サンドブラスト処理※1・ 超音波洗浄・乾燥



2 ボンド塗布



3 乾燥

マイルドなエアブローで
5秒以上乾燥※2



4 ペースト塗布

オートミックスの場合

又は

ハンドミックスの場合

クラウンまたは窩洞内に
ペースト塗布



操作時間

操作時間 (23℃)	1分
ペーストを窩洞内に塗布 した場合の操作時間 (37℃)	30秒

① AペーストBペースト
等量採取・10秒練和



水分混入をさけるため練和紙、
練和棒は冷蔵保管しない

② クラウンまたは
窩洞内にペースト塗布




操作時間

操作時間 (23℃)	2分
ペーストを窩洞内に塗布 した場合の操作時間 (37℃)	30秒

5 装着・余剰セメント の除去※3

1か所につき
1～2秒光照射

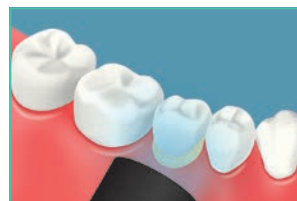

6 最終硬化 (5分保持)※4



POINT

※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の電子添文等にしたがってください。サンドブラスト処理後に試適した場合には、リン酸エッチング材等を電子添文等にしたがって処理し(リン酸エッチング材は5秒間処理)、水洗・乾燥を行います。歯科セラミックス用接着材料を電子添文等に従い適用することも可能です。

※2 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。

※3 化学硬化により除去する際は2～4分保持してください。

※4 光を透過する補綴装置の場合はクラウン全体への光照射(右表参照)による最終硬化も可能です。

照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.1を参照ください。

3 ジルコニアクラウンの接着



通法にしたがい仮着材・仮封材除去、窩洞・支台歯の清掃、防湿等を行ってください。




クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick 2



SA ルーティング®
Multi

1 試適後、 サンドブラスト処理※1・ 超音波洗浄・乾燥

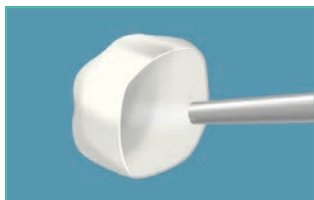

より高い接着力を求める場合

1 「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」塗布

待ち時間なしで 2 へ



2 乾燥

マイルドなエアブローで
5秒以上乾燥※2

5秒以上乾燥



2 ペースト塗布

オートミックスの場合

又は

ハンドミックスの場合

クラウンまたは窩洞内に
ペースト塗布




操作時間

操作時間 (23℃)	1分
ペーストを窩洞内に塗布 した場合の操作時間 (37℃)	40秒

1 AペーストBペースト
等量採取・10秒練和



2 クラウンまたは
窩洞内にペースト塗布

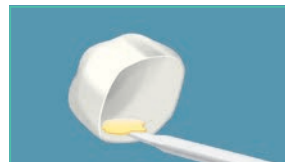

操作時間

操作時間 (23℃)	2分
ペーストを窩洞内に塗布 した場合の操作時間 (37℃)	40秒

「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」を塗布した場合の操作時間は30秒

3 装着・余剰セメント の除去※3

1か所につき
2～5秒光照射



「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」を塗布した場合は1ヶ所につき1～2秒光照射

4 最終硬化 (5分保持)※4



POINT

※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の電子添文等にしたがってください。サンドブラスト処理後に試適した場合には、リン酸エッチング材等を電子添文等にしたがって処理し(リン酸エッチング材は5秒間処理)、水洗・乾燥を行います。

※2 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。

※3 化学硬化により除去する際は2～4分保持してください。

※4 光を透過する補綴装置の場合はクラウン全体への光照射(照射器と照射時間の関係参照)による最終硬化も可能です。

照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.1を参照ください。

本術式は「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」電子添文等に記載の「セメント接着における窩洞、及び支台歯の処理」及び「SAルーティング® Multi」電子添文等に記載の「金属、ジルコニア/アルミナ等の金属酸化物系セラミックス、無機物フィラーを含むレジン系材料、シリカ系ガラスセラミックス、歯科用陶材で作製したクラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着」を示します。

インプラントアバットメントへの 補綴装置の接着



通法にしたがい仮着材・仮封材除去、窩洞・支台歯の清掃、防湿等を行ってください。



SA ルーティング®
Multi

1 補綴装置の処理

無機物フィラーを含むレジン系材料、シリカ系ガラスセラミックス、歯科用陶材の場合



必要に応じて
サンドブラスト※1

金属、ジルコニア/アルミナ等の金属酸化物系セラミックスの場合




サンドブラスト※1

2 ペースト塗布

オートミックスの場合

クラウンにペースト塗布

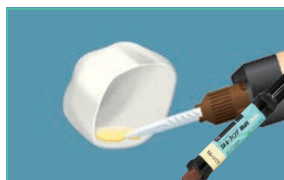

操作時間

操作時間(23℃)

1分

又は

ハンドミックスの場合

① AペーストBペースト
等量採取・10秒練和



10秒

水分混入をさけるため練和紙、練和棒は冷蔵保管しない

② クラウンにペースト塗布




操作時間

操作時間(23℃)

2分

3 補綴装置の装着

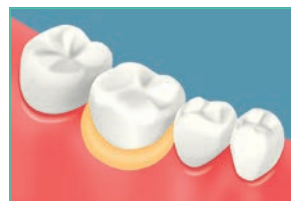


4 余剰セメントの除去※2



1か所につき2～5秒光照射

5 最終硬化(5分保持)※3

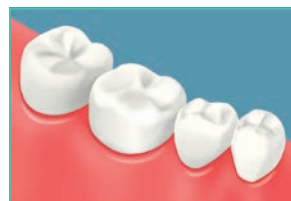

直接充填

セメント接着

支台築造

リベア

知覚過敏の処置

歯面コーティング

POINT

※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の電子添文等にしたがってください。サンドブラスト処理後に試適した場合には、リン酸エッチング材等を電子添文等にしたがって処理し(リン酸エッチング材は5秒間処理)、水洗・乾燥を行います。

※2 化学硬化により除去する際は2～4分保持してください。

※3 光を透過する補綴装置の場合補綴装置全体及びマージン部への光照射(照射器と照射時間の関係参照)による最終硬化も可能です。

照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.1を参照ください。


5 金属冠、前装冠の接着




SA ルーティング®
Multi

通法にしたがい仮着材・仮封材除去、窩洞・支台歯の清掃、防湿等を行ってください。

1 試適後、サンドブラスト処理※1 超音波洗浄・乾燥

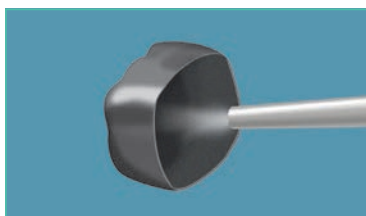


2 AペーストBペースト 等量採取・10秒練和

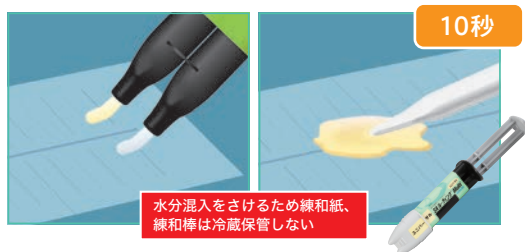

10秒

3 クラウンまたは 窩洞内にペースト塗布

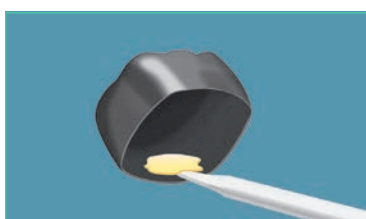

操作時間

操作時間 (23℃)	2分
ペーストを窩洞内に塗布した場合の操作時間 (37℃)	40秒

4 装着・余剰セメントの除去※2



1か所につき2～5秒光照射

5 最終硬化 (5分保持)



POINT

※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の電子添文等にしたがってください。

※2 化学硬化により除去する際は2～4分保持してください。

照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	10秒

光量についてはP.1を参照ください。

本術式は「SA ルーティング® Multi」電子添文等に記載の「クラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着」を示します。



クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick 2



SA ルーティング®
Multi

1 レジンコアの表面処理

サンドブラスト処理※1
超音波洗浄・乾燥



より高い接着力を求める場合

①「クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick 2」塗布

待ち時間なしで ②へ



② 乾燥

マイルドなエアブローで5秒以上乾燥※2

5秒以上乾燥




2 コアの被着面または築造窩洞内へペーストを注入



築造窩洞内へ注入した場合は40秒以内に ③へ

「クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick 2」を塗布した場合は30秒以内に ③へ

3 コアの装着※3、余剰セメント除去※4

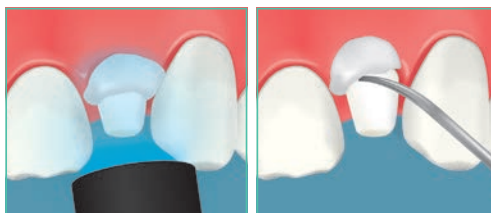

1か所につき2～5秒光照射

「クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick 2」を塗布した場合は1ヶ所につき1～2秒光照射

4 マージン部に光照射



照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	10秒

光量についてはP.1を参照ください。

5 支台歯形成

10分保持し形成



POINT

- ※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の電子添文等にしてください。
- ※2 バキュームで吸引しながら液面が動かないまで乾燥してください。根管内に残った余剰のボンドはペーパーポイント等で除去し、その後再度エアブローで乾燥してください。
- ※3 気泡の混入にご注意ください。
- ※4 化学硬化により除去する際は2～4分保持してください。

7 直接法レジンコア【ファイバーポスト】



通法にしたがい、根管形成及び、根管充填を行った後、築造窩洞を形成し、ポストの試適、切断等を行ってください。



クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick 2



クリアフィル® DCコア
オートミックス® ONE

1 ポストの表面処理

① リン酸処理
水洗・乾燥
5秒間処理

② シラン処理（「クリアフィル®
セラミック プライマー プラス」）
塗布・エアブローで乾燥
待ち時間なしでエアブロー

関連商品

- 歯科用エッチング材 ① K エッチャント シリンジ
- 歯科根管用ポスト ② クリアフィル® AD ファイバーポスト II
- 歯科セラミックス用 ③ クリアフィル® セラミック プライマー プラス 接着材料

※製品画像に付与された番号を参照ください。

2 ボンド塗布

待ち時間なしで③へ

3 マイルドなエアブローで5秒以上乾燥※1

5秒以上乾燥


4 光照射




ボンドへの照射器と照射時間の関係

分類	照射時間	「ペンキュアー 2000」の 高出力モードの場合は3秒、 標準モードは10秒 (製造販売元:株式会社 モリタ製作所)
高出力LED照射器	5秒	
LED照射器	10秒	
ハロゲン照射器		光量についてはP.1を参照ください。

5 ペーストの填入※2

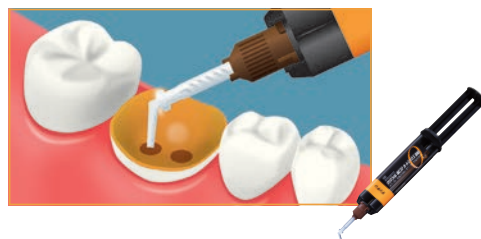

6 ポスト植立・光照射

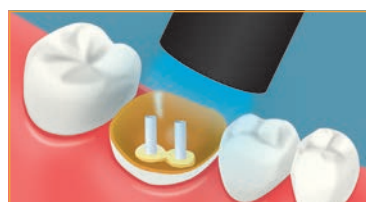

「ペーストへの照射時間と硬化深度の関係
(歯科重合用光照射)」参照

7 ペーストの築盛・光照射※3,4 ・支台歯形成



ペーストへの照射時間と硬化深度の関係 (歯科重合用光照射)

照射器	光源	光量	照射時間	硬化深度
LED照射器	青色LED	300mW/cm² 以上	10秒	1.5mm
			20秒	2.0mm
ハロゲン照射器	ハロゲンランプ	300mW/cm² 以上	10秒	1.5mm
			20秒	2.0mm

POINT

- ※1 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。根管内に残った余剰のボンドはペーパーポイント等で除去し、その後再度エアブローで乾燥してください。
- ※2 ポストの植立は1分以内に行ってください。
- ※3 舌側と唇側の2方向より所定時間光照射してください。
- ※4 光硬化深度以上に築盛する場合は光照射後6分以上静置してください。



通法にしたがい、根管形成及び、根管充填を行った後、築造窩洞を形成し、ポストの試適、切断等を行ってください。



クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick 2



クリアフィル® DCコア
オートミックス® ONE

直接充填

セメント接着

支台築造

リペア

知覚過敏の処置

歯面コーティング

1 ポストの表面処理

サンドブラスト※1
ボンド塗布・エアー
ブローで乾燥

ボンド塗布・乾燥



2 ボンド塗布

待ち時間なしで [3] へ



3 乾燥

マイルドなエアーブローで5秒以上乾燥※2

5秒以上乾燥



4 光照射

ボンドへの照射器と照射時間の関係


分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.1を参照ください。

「ベンキュアー 2000」の高出力モードの場合は3秒、標準モードは10秒(製造販売元:株式会社 モリタ製作所)



5 ペーストの填入※3

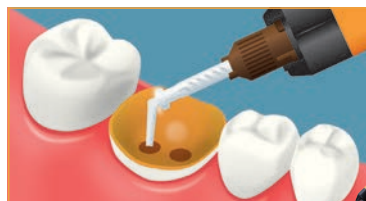

6 ポスト植立・光照射



「ペーストへの照射時間と硬化深度の関係(歯科重合用光照射)」参照

7 ペーストの築盛・光照射※4,5 ・支台歯形成



ペーストへの照射時間と硬化深度の関係(歯科重合用光照射)

照射器	光源	光量	照射時間	硬化深度
LED照射器	青色LED	300mW/cm ² 以上	10秒	1.5mm
			20秒	2.0mm
ハロゲン照射器	ハロゲンランプ	300mW/cm ² 以上	10秒	1.5mm
			20秒	2.0mm

POINT

※1 使用する材料の電子添文等をご参照ください。

※2 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。根管内に残った余剰のボンドはペーパーポイント等で除去し、その後再度エアーブローで乾燥してください。

※3 ポストの植立は1分以内に行ってください。

※4 舌側と唇側の2方向より所定時間光照射してください。

※5 光硬化深度以上に築盛する場合は光照射後6分以上静置してください。

口腔内リペア【歯質を含む場合】

(例えば、金属・陶材・コンポジットレジン)



クリアフィル® ポーセレンボンド
アクティベーター



クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick 2

1 被着面の粗造化、水洗、乾燥



2 リン酸処理、5秒後水洗、乾燥



3 ボンドと「クリアフィル® ポーセレンボンド アクティベーター」の混和液※1,2 塗布



4 乾燥

マイルドなエアブローで5秒以上乾燥※3



5 光照射



ボンドへの照射器と照射時間の関係


分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

「ペンキュアー 2000」の
高出力モードの場合は3秒、
標準モードは10秒
(製造販売元: 株式会社 モリタ製作所)

光量についてはP.1を参照ください。

6 光重合型CRの充填、光照射、研磨※4

メタル部のマスキングには「クリアフィル®
ST オペーカー」をご使用ください。

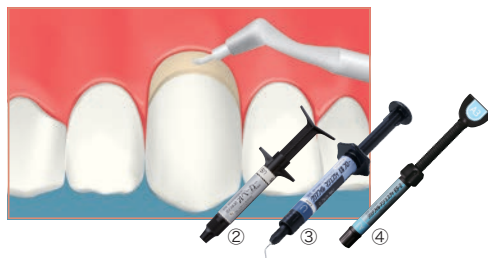

関連商品

- 歯科用エッチング材
- ① K エッチャント シリンジ
- コンポジットレジン
- ② クリアフィル® ST オペーカー
- ③ クリアフィル® マジェスティ® ESフロー Universal
- ④ クリアフィル® マジェスティ® ES-2

※製品画像に付与された番号を参照ください。

POINT

- ※1 粗造化が困難な貴金属面に対しては、「アロイ プライマー」を電子添文等にしたい塗布、乾燥した後にボンドと「クリアフィル® ポーセレンボンド アクティベーター」の混和液を塗布してください。
- ※2 1滴ずつ等量混和してください。
- ※3 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。
- ※4 ご使用の色調遮蔽材料、光重合型CRの電子添文等をご参照ください。

本術式は「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」電子添文等に記載の「光重合型の歯科充填用コンポジットレジンによる前装冠等の歯冠修復物の補修」を示します。

口腔内リペア【歯質を含まない場合】

(例えば、金属・陶材・コンポジットレジン)



クリアフィル®
セラミック プライマー プラス



クリアフィル®
ST オペカー

1 防湿、被着面の粗造化、水洗、乾燥




2 被着面のリン酸処理、5秒後水洗い、乾燥



3 「クリアフィル® セラミック プライマー プラス」の塗布



4 金属面に「クリアフィル® ST オペカー」を塗布(0.5 mm以下)・光照射(下記表参照)その後、光重合型CRの処理※

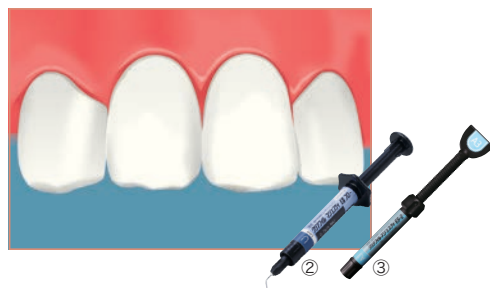

「クリアフィル® ST オペカー」の照射時間

歯科用可視光線照射器	光量	材料の厚さ(mm)	
		～0.4	0.4～0.5
従来型ハロゲン照射器	150～550mW/cm ²	40秒	60秒
高出力ハロゲン照射器	550mW/cm ² 以上	10秒	20秒
プラズマアーク照射器	2000mW/cm ² 以上(400～515 nm) 且つ 450mW/cm ² 以上 (400～435 nm)	5秒	5秒
LED照射器	120mW/cm ² 以上	40秒	80秒

使用製品

- 歯科用エッチング材
- ① K エッチャント シリンジ
- コンポジットレジン
- ② クリアフィル® マジェスティ® ESフロー Universal
- ③ クリアフィル® マジェスティ® ES-2

※製品画像に付与された番号を参照ください。

POINT

※ 使用する材料の電子添文等をご参照ください。

本術式は「クリアフィル® ST オペカー」電子添文等に記載の「前装冠の補修(破折した前装冠の補修時における金属色の遮蔽)(歯肉の退縮した前装冠補修時の歯根色と金属色の遮蔽)」及び「クリアフィル® セラミック プライマー プラス」電子添文等に記載の「光重合型の歯科充填用コンポジットレジンによる歯冠修復物(前装冠等)の補修」を示します。

直接充填

セメント接着


支台築造

リペア

知覚過敏の処置

歯面コーティング

11 知覚過敏の処置

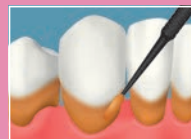


クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick 2

1 患部の診察・歯面清掃・防湿 患部全体にボンド塗布



2 乾燥(弱～中圧)

マイルドなエアブローで液面が
動かなくなるまで乾燥※

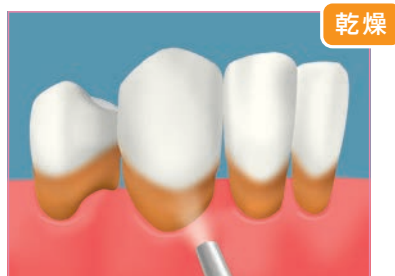

3 光照射




ボンドへの照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

「ペンキュアー 2000」の
高出力モードの場合は3秒、
標準モードは10秒
(製造販売元:株式会社 モリタ製作所)

光量についてはP.1を参照ください。

4 未重合層の除去

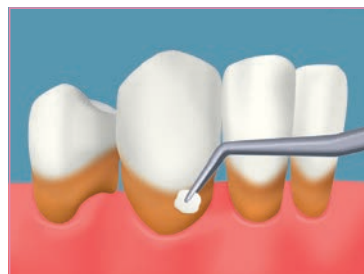

POINT ※ バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。

本術式は「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」電子添文等に記載の「知覚過敏の処置」を示します。

12 象牙質レジンコーティング



クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick 2

1 支台歯形成、防湿、歯髄保護 支台歯全体にボンド塗布




2 乾燥(弱～中圧)

マイルドなエアースローで
5秒以上乾燥 ※1



3 光照射

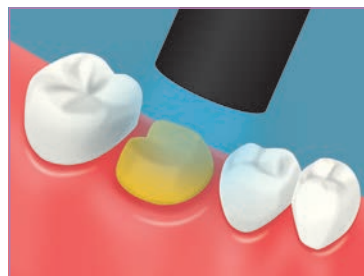


ボンドへの照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	10秒

「ペンキュアー 2000」の
高出力モードの場合は3秒、
標準モードは10秒
(製造販売元:株式会社 モリタ製作所)

光量についてはP.1を参照ください。

4 未重合層の除去・完了 ※2

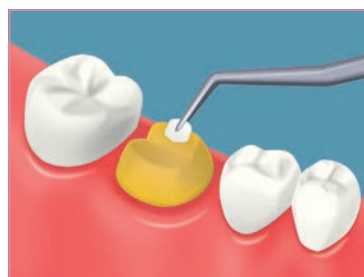

POINT

※1 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。

※2 レジン系の仮着材、仮封材を用いる場合は、コーティング面に接着する恐れがあるため、必ず歯科用分離材をご使用ください。歯科用分離材の使用法は、当該品の電子添文等に示されています。

本術式は「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」電子添文等に記載の「間接修復法の前処理としての窩洞又は支台歯のシーリング・コーティング」を示します。

直接充填

セメント接着

支台築造

リペア

知覚過敏の処置

歯面コーティング

- クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2
管理医療機器 歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料)(歯科金属用接着材料)(歯科用知覚過敏抑制材料)(歯科用シーリング・コーティング材) 医療機器認証番号: 305ABBZX00012000
- クリアフィル® マジェスティ® ES フロー Universal
管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン 医療機器認証番号: 224ABBZX00170000
- クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE
管理医療機器 歯科用支台築造材料 医療機器認証番号: 223ABBZX00086000
- SA ルーティング® Multi
管理医療機器 歯科接着用レジンセメント 医療機器認証番号: 230ABBZX00096000
- クリアフィル® マジェスティ® ES-2
管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン 医療機器認証番号: 224ABBZX00119000
- クリアフィル® AD ファイバーポスト II
管理医療機器 歯科根管用ポスト成形品 医療機器認証番号: 301ABBZX00019000
- クリアフィル® セラミック プライマー プラス
管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料(歯科金属用接着材料) 医療機器認証番号: 226ABBZX00105000
- K エッチャント シリンジ
管理医療機器 歯科用エッチング材 医療機器認証番号: 226ABBZX00089000
- クリアフィル® ボーセレンボンド アクティベーター
管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料(歯科金属用接着材料)(歯科用象牙質接着材)(歯面処理材) 医療機器承認番号: 16300BZZ00085000
- アロイ プライマー
管理医療機器 歯科金属用接着材料 医療機器認証番号: 20900BZZ00723000
- クリアフィル® ST オペカー
管理医療機器 歯科用色調遮蔽材料 医療機器承認番号: 16200BZZ00980000

●ご使用に際しましては、製品の電子添文等を必ずお読みください。 ●仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

製品・各種技術に関するお問い合わせ

クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

☎ 0120-330-922

平日 10:00～17:00

ホームページ

www.kuraraynoritake.jp

連絡先 **クラレノリタケデンタル株式会社**

〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー
フリーダイヤル: 0120-330-922

販売元 **株式会社 モリタ**

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL. (06) 6380-2525
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL. (03) 3834-6161
お客様相談センター: 0800-222-8020 (医療従事者様向窓口)
https://www.dental-plaza.com

製造販売元 **クラレノリタケデンタル株式会社**

〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

クラレノリタケデンタル公式アプリ



クラレノリタケデンタル

検索

推奨 OS バージョン iOS14.0 以上 / Android9.0 以上