

# グレーズによる仕上げガイド



√ 異なる色調のジルコニアを積層したマルチレイヤード構造により、 グラデーションを有するフルジルコニア補綴物をシンプルな作業で製作できます。

#### グレーズ法の仕上げステップ ▶研磨 ▶サンドブラスト ▶グレーズ

## 基本ステップ



加工痕ならしを行い、表面をスムースに仕上げます。



研磨した部位を除き歯冠表面 及び内面をアルミナサンド ブラスト処理  $(50-70 \mu m, 0.2 MPa)$ 

10分間の超音波洗浄 (アルコール又はアセトン) またはスチームクリーナー洗浄



「セラビアン® ZR | FCペーストステインのGlaze 又はClear Glazeを30μm以上の厚みに塗布

対合歯との接触部位の研磨

## ディテールが必要なケース場合



基本ステップ参照



基本ステップ参照





表面のディテールが必要な場合、Glaze又はClear Glazeを塗布した後、ブラシ等により余剰分を除去 (溝部など)

#### 焼成ステップ



補綴物をスタンドまたはピンに固定



焼成:10分(セレックスピードファイヤー)



完成

#### NOTE:


「セラビアン®ZR」FCペーストステインの Glaze又はClear Glazeはリキッドで希釈し過ぎないで下さい。 垂れやすくなり、均一塗布できません。






## 「セラビアン® ZR」FCペーストステインを用いて色調を微調整するステップ

#### 着色例

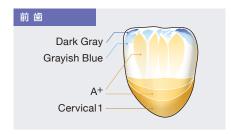

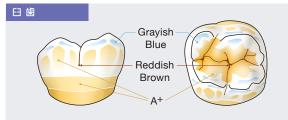




#### ステップ





グレーズ焼成後、色調の微調整が必要な場合はFCペースト ステインの各色を塗布して下さい。

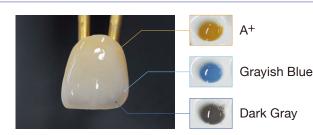

焼成、完成

管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス 医療機器認証番号: 229AFBZX00049000

カタナ® ジルコニア ブロック

メーカー希望小売価格

単品 12Z: A2、A3、A3.5 ··· 5個/箱 14Z: A2、A3、A3.5 ··· 5個/箱 イントロセット (ナチュラル) 12Z:A2、A3 …各1個/箱



管理医療機器 歯科用陶材 医療機器認証番号: 223AFBZX00161000 セラビアン®ZR FCペーストステインキット



ホームページ

●印刷のため実際の色調と異なる場合があります。
●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。
●仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

製品・各種技術に関するお問い合わせ

クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

○ 0120-330-922 月曜~金曜 10:00~17:00

www.kuraraynoritake.jp

製造販売元 クラレノリタケ デンタル株式会社

〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

連絡先 クラレノリタケ デンタル株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 (大手センタービル) フリーダイヤル:0120-330-922