



使用上のご注意 〈ご使用の前に必ずお読みください〉

「パナビア[®]F 2.0 ペースト」に関する注意

- ブラウン、ホワイト、ライトはデュアルキュア型、オペークは化学重合型であり、硬化方法が異なるため、使用前に添付文書に記載の使用方法を確認してください。
- ブラウン、ホワイト、ライトは、練和及び接着操作時に強い光が長時間あたりますとペーストが硬化する場合がありますので、窓際の自然光は避け、デンタルライトの光量を下げるなどの回避処置を行ってください。
- ペーストの採取後すぐに練和できない場合は、必ず遮光板を使用し、15分以内に練和してください。練和後は5分以内に使用してください。
- ペーストは必ず「ED プライマーⅡ」を塗布していない、補綴修復物側に塗布してください。
- 最終硬化は、補綴修復物を3分間以上保持して行います。光照射の場合も同様に行ってください。保持時間が不十分な場合、研磨による振動や衝撃で修復物の脱落などが発生する可能性があります。

「ED プライマーⅡ」に関する注意

- 採取後5分以内に使用してください。
- 「ED プライマーⅡ」は必ず支台歯・窩洞側へ塗布してください。
- 窩洞の隅角部及び築造窩洞内に液溜りができないよう、スポンジ、ペーパーポイント等で余剰の「ED プライマーⅡ」を吸い取った後、エアブローで確実に乾燥してください。

「パナビア[®]F 2.0 ペースト」と「ED プライマーⅡ」の接触時の注意

- ペーストと「ED プライマーⅡ」塗布面が接触すると硬化が促進されますので、接着操作は下表の硬化開始時間内に行ってください。

口腔内（37℃）で「ED プライマーⅡ」塗布面と接触した場合のペーストの硬化開始時間

使用部位	窩洞及び支台歯	築造窩洞
硬化開始時間	60秒	40秒

ご使用に際しましては必ず添付文書をお読みください。

製品に関するお問い合わせ先

製造販売元 **クラレ/ナリタケデンタル株式会社**
〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28
フリーダイヤル:0120-330922

販 売 元 **株式会社 モリタ**
〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18
TEL(06)6380-2525
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15
TEL(03)3834-6161