

管理医療機器
歯科用セメントキット

パナビア® V5

「パナビア® V5」で実現する

ワンランク上の補綴修復*

* 当社従来品と比較して




歯質接着性に優れ、
使いやすさを追求



「パナビア® F2.0」の3倍の象牙質接着を実現^{※1}

高活性な新規化学重合触媒^{※2}の採用により、優れた歯質接着性を実現しました。特に象牙質接着性は、当社従来品と比べて大幅に向上。^{※1}「パナビア® F2.0」の3倍の象牙質接着力を有します。

歯質への接着強さ（牛歯、引張、化学重合）

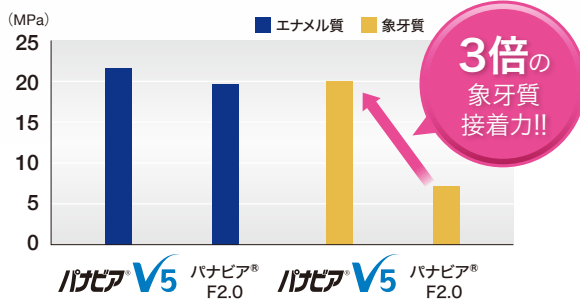

測定条件：牛歯#1000研磨面、被着面積3mm²、化学硬化37℃水中に1日浸漬後、測定
測定装置：オートグラフ AG-100kN(島津製作所)クロスヘッドスピード：2mm/min
クラレノリタケデンタル(株)測定：条件により数値は異なります。


化学重合のみで高い接着力を発揮

さらに、象牙質接着力が高いため、
根管象牙質とポスト・コアの
接着にも性能を発揮します。



写真提供：山手通り歯科 森田 誠 先生

各種補綴物への接着強さ（サーマルサイクル3,000回後）

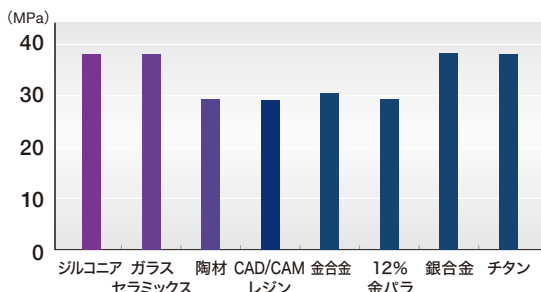

測定条件：サンドブラスト処理(ジルコニア、金属、CAD/CAMレジン)、#1000研磨(陶材、ガラスセラミックス)、被着面積5mm²、被着体に本品適用後、「パナビア® V5ペースト」を塗布して圧接し、マージン部へベンキュア2000で2方向から10秒光照射
37℃水中に1日浸漬し、サーマルサイクル(4～60℃、3000回)後、測定
測定装置：オートグラフ AG-100kN(島津製作所)クロスヘッドスピード：1mm/min
クラレノリタケデンタル(株)測定：条件により数値は異なります。



「カタナ® クリーナー」で清掃

唾液や血液などの汚染により、
歯科用接着材の接着力は低下します。
「カタナ® クリーナー」で
歯質・補綴装置を清掃することで、
併用する接着材料の接着性を高めます。



●高い洗浄効果

色素結合法を
用いた染色試験
(人工唾液汚染)



測定条件：ジルコニア板(「ノリタケ カタナ® ジルコニア HT」)を人工唾液に浸漬(1分間)
人工唾液に含まれるタンパク質と結合する染色剤による染色度で汚染度を評価
クラレノリタケデンタル(株)測定：条件により結果は異なります。

の発売から30年 「パナビア® V5」の誕生です。

シンプルなお操作ステップ

〔使用用途1〕

クラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着。
詳しくは添付文書をご確認下さい。



補綴物には、
これ1本!!

クリアフィル® セラミック プライマー プラス

陶材 シリカ系ガラスセラミックス
CAD/CAMレジン ジルコニア + 金属

「クリアフィル® セラミック プライマー プラス」は、シランカップリング剤に加え、リン酸エステルモノマー「MDP®」も含有することから、陶材、シリカ系ガラスセラミックス、CAD/CAMレジン、ジルコニア、金属の前処理材として有効です。

写真提供：高輪歯科 加藤 正治 先生

1 試適



2 補綴物の前処理




3 窩洞／支台歯の 処理

※パナビア® V5 トゥースプライマーの塗布には、付属のアプリケーターブラシでも使用可能です。



4 装着

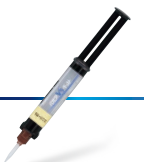

トライイン ペースト

接着前の試適で色調確認が行えます。

支台歯には、
（歯質、レジンコア、
メタルコア）
これ1本!!

パナビア® V5 トゥース プライマー



歯質 レジンコア メタルコア

新しい重合促進剤の採用により、
1液化を達成しました。

余剰セメント除去のタイミングを選択できる！

5-a 光照射による方法

余剰セメントに3～5秒光照射※。半硬化した余剰セメントを探針等で除去。

※オペークの場合は、5-bの方法で除去してください。



または



5-b 拭き取り（小筆、ガーゼ等）

余剰セメントをガーゼ、小筆等で除去。
マージン部に10秒光照射。

6 最終硬化

化学重合による
最終硬化は装着後

※レジンコアの場合は、合着・植立から
6分以上

3分







色調安定性に優れた5色のセメントペースト

“アミンフリー”の新規化学重合触媒※2を導入。BPO-アミン系触媒を採用した当社従来製品と比較して、
優れた色調安定性を発現します。

※2 添付文書記載の化学重合開始剤、重合促進剤を指す

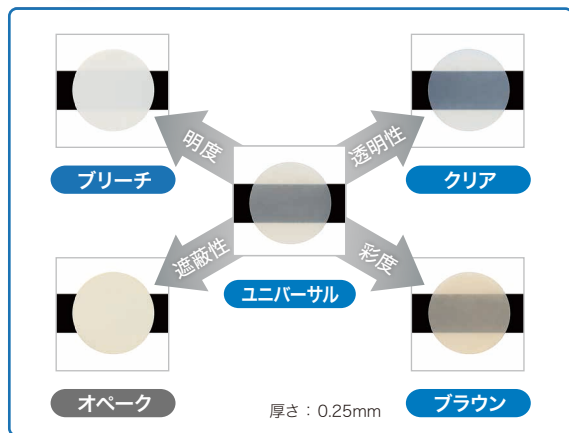

硬化物の色調安定性

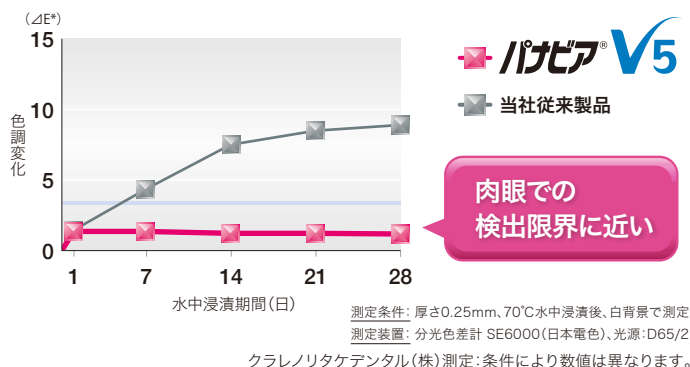

管理医療機器
歯科用セメントキット
パナビア® V5
医療機器認証番号: 226ABBZX00106000



コンプリートキット

- ・パナビア® V5 ベースト(ユニバーサル)半量タイプ 4.2 g (2.4 mL) ×1本
- ・パナビア® V5 ベースト(クリア)半量タイプ 4.2 g (2.4 mL) ×1本
- ・パナビア® V5 ベースト(ブラウン)半量タイプ 4.2 g (2.4 mL) ×1本
- ・パナビア® V5 ベースト(ブリーチ)半量タイプ 4.2 g (2.4 mL) ×1本
- ・パナビア® V5 ベースト(オペーク)半量タイプ 4.2 g (2.4 mL) ×1本
- ・パナビア® V5 トライイン ベースト(ユニバーサル) 2.4 g (1.8 mL) ×1本
- ・パナビア® V5 トライイン ベースト(クリア) 2.4 g (1.8 mL) ×1本
- ・パナビア® V5 トライイン ベースト(ブラウン) 2.4 g (1.8 mL) ×1本
- ・パナビア® V5 トライイン ベースト(ブリーチ) 2.4 g (1.8 mL) ×1本
- ・パナビア® V5 トライイン ベースト(オペーク) 2.4 g (1.8 mL) ×1本
- ・パナビア® V5 トゥース プライマー 2 mL ×1本
- ・クリアフィル® セラミック プライマー プラス 2 mL ×1本
- ・K エッチャント シリンジ 3 mL ×1本
- ・付属品: ミキシングチップ(合着用) 30個、ミキシングチップ(エンド用) 10個、ガイドチップ(エンド用細) 10個、ニードルチップ(E) 20個、アプリケーションブラシ(ファインベシルバー) 50本、ディスク小筆ブラシ(黒) 50個、小筆ホルダー(黒) ×1本、混和血(FPN) ×1個

スターターキット (ユニバーサル)

- ・パナビア® V5 ベースト(ユニバーサル) 8.1 g (4.6 mL) ×1本
- ・パナビア® V5 トライイン ベースト(ユニバーサル) 2.4 g (1.8 mL) ×1本
- ・パナビア® V5 トゥース プライマー 2 mL ×1本
- ・クリアフィル® セラミック プライマー プラス 2 mL ×1本
- ・K エッチャント シリンジ 3 mL ×1本
- ・付属品: ミキシングチップ(合着用) 15個、ミキシングチップ(エンド用) 5個、ガイドチップ(エンド用細) 5個、ニードルチップ(E) 20個、アプリケーションブラシ(ファインベシルバー) 50本、ディスク小筆ブラシ(黒) 50個、小筆ホルダー(黒) ×1本、混和血(FPN) ×1個



管理医療機器 歯科用コンボジットレジセメント
パナビア® V5 ペースト
医療機器認証番号: 226ABBZX00102000
(ユニバーサル、クリア、ブラウン、ブリーチ、オペーク)
・ 8.1 g (4.6 mL) ×1本 ・ ミキシングチップ(合着用) 20個

ミキシングチップ(合着用)
・ 20個

ミキシングチップ(エンド用)
・ 20個

ガイドチップ(エンド用細)
・ 20個

管理医療機器 歯科用エッチング材
K エッチャント シリンジ
医療機器認証番号: 226ABBZX00089000
・ 容量: 3mL

管理医療機器 歯科用色調適合確認材料
パナビア® V5 トライイン ベースト
医療機器認証番号: 226ABBZX00103000
(ユニバーサル、クリア、ブラウン、ブリーチ、オペーク)
・ トライインペースト 2.4 g (1.8 mL) ×1本

管理医療機器 歯面処理材
(歯科セラミックス用接着材料、歯科金属用接着材料)
パナビア® V5 トゥース プライマー
医療機器認証番号: 226ABBZX00104000
・ 容量: 4mL

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料
(歯科金属用接着材料)
クリアフィル® セラミック プライマー プラス
医療機器認証番号: 226ABBZX00105000
・ 容量: 4mL

●関連製品

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料
(歯科金属用接着材料、歯面処理材)
カタナ® クリーナー
医療機器認証番号: 226ABBZX00105000
・ 容量: 4mL

- データは全てクラレノリタケデンタル株式会社測定です。条件などにより数値は異なります。●印刷のため実際の色調と異なる場合があります。
- ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。●仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

パナビア® F2.0 管理医療機器 歯科接着用レジセメント 医療機器認証番号: 224ABBZX00029000

製品・各種技術に関するお問い合わせ

クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

0120-330-922

月曜～金曜 10:00～17:00

ホームページ

www.kuraraynoritake.jp

連絡先 **クラレノリタケデンタル株式会社**

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 (大手センタービル)
フリーダイヤル: 0120-330-922

製造販売元 **クラレノリタケデンタル株式会社**

〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

販売元 **株式会社モリタ**

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL. (06) 6380-2525
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL. (03) 3834-6161
お客様相談センター: 0800-222-8020
http://www.dental-plaza.com

クラレノリタケデンタル公式アプリ



Download on the
App Store

Google Play
で手に入れよう

クラレノリタケデンタル

検索

サポート OS バージョン iOS9.0 以上 / Android 5.0 以上