



管理医療機器 歯科用色調遮蔽材料
医療機器認証番号：16200BZZ00980000

クリアフィル® ST オペーカー

変着色歯や金属などに使用する
色調遮蔽用のコンポジットレジン

糸引きも少なくインスツルメントなどで塗布、充填が容易

使用ステップ (例：口腔内リペア) ※使用する材料の電子添文等をご参照ください。

1 防湿、被着面の粗造化、水洗、乾燥




2 被着面のリン酸処理、5秒後水洗い、乾燥



3 「クリアフィル® セラミックプライマー プラス」の塗布



4 金属面に「クリアフィル® ST オペーカー」を塗布(0.5 mm以下)・光照射※

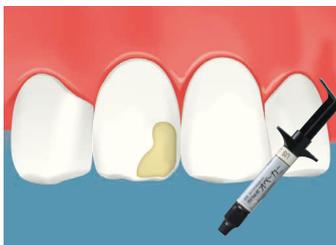

※「クリアフィル® ST オペーカー」の照射時間

歯科用可視光線照射器	光量	材料の厚さ(mm)	
		~0.4	0.4~0.5
従来型ハロゲン照射器	150~550 mW/cm ²	40秒	60秒
高出力ハロゲン照射器	550 mW/cm ² 以上	10秒	20秒
プラズマアーク照射器	2000 mW/cm ² 以上(400~515 nm) 且つ 450 mW/cm ² 以上(400~435 nm)	5秒	5秒
LED照射器	120 mW/cm ² 以上	40秒	80秒

5 光重合型CRの処理



関連材料

- 歯科用エッチング材
- コンポジットレジン
- ① K エッチャント シリンジ
- ③ クリアフィル® マジェスティ® ESフロー Universal
- 歯科セラミックス用接着材料
- ④ クリアフィル® マジェスティ® ES-2

※製品画像に付与された番号を参照ください。

本術式は「クリアフィル® ST オペーカー」電子添文等に記載の「前装冠の補修(破折した前装冠の補修時における金属色の遮蔽(歯肉の退縮した前装冠補修時の歯根色と金属色の遮蔽))及び「クリアフィル® セラミックプライマー プラス」電子添文等に記載の「光重合型の歯科充填用コンポジットレジンによる歯冠修復物(前装冠等)の補修」を示します。

◎シェード
ラインナップ

〈US〉
汎用性の高い色調



〈L〉
USより明るめの色調



クリアフィル® ST オペーカー

管理医療機器 歯科用色調遮蔽材料
医療機器認証番号：16200BZZ00980000

単品
容量：各 4 g
色調：US, L



- K エッチャント シリンジ 管理医療機器 歯科用エッチング材 医療機器認証番号：226ABBZX00089000
- クリアフィル® セラミックプライマー プラス 管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料(歯科金属用接着材料) 医療機器認証番号：226ABBZX00105000
- クリアフィル® マジェスティ® ESフロー 管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン 医療機器認証番号：224ABBZX00170000
- クリアフィル® マジェスティ® ES-2 管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン 医療機器認証番号：224ABBZX00119000
- 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。 ● ご使用に際しましては、製品の電子添文等を必ずお読みください。 ● 仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

クラレノリタケデンタル株式会社

お問い合わせ (医療従事者様・販売代理店様向け窓口)

☎ 0120-330-922 平日 10:00~17:00

〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー

【製造販売元】クラレノリタケデンタル株式会社
〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

【販売元】株式会社モリタ
〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18

お客様相談センター：0800-222-8020 (医療従事者様向け窓口)

クラレノリタケデンタル
LINE公式アカウント

友だち追加はこちらから



最新情報
配信中!