



●ご使用に際しては、ノリタケスーパーポーセレンAAAの添付文書、取扱説明書(総合マニュアル)を必ずご参照ください。

▶商品構成

種類	容量	色調名													
ペーストオペーク	6g	POA1	POA2	POA3	POA3.5	POA4	POB1	POB2	POB3	POB4	POC1	POC2	POC3	POC4	
		POD2	POD3	POD4	POnA1	POnA2	POnA3	POnA3.5	POnA4	PONW0	PONW0.5	PONP1.5	PONP2.5	POEW0	
		POEW	NP Bonder												
ペーストオペークモディファイヤー	3g	PO White	PO Gray	PO Blue	PO Yellow	PO Orange	PO Earth Brown	PO Reddish Brown	PO Pink						
パウダーオペーク	10g,50g,200g (OS:10g,50g)	A10	A20	A30	A3.50	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	
		D20	D30	D40	OS										
オペークモディファイヤー	10g	OM Gray	OM Yellow	OM Orange	OM Brown	OM Dark Brown	OM Pink								
マージン	10g	MA1	MA2	MA3	MA3.5	MA4	MB1	MB2	MB3	MB4	MC2	MC4	MD3	MD4	
		MNW0	MNW0.5	MNP1.5	MNP2.5	M Clear	M Orange	M Peach	MDL	MRP					
オペーシャスボディ	10g,50g	OBA1	OBA2	OBA3	OBA3.5	OBA4	OBB1	OBB2	OBB3	OBB4	OBC1	OBC2	OBC3	OBC4	
		OBD2	OBD3	OBD4	OBNP1.5	OBNP2.5	OB White	OB Orange	OB Pale Pink						
サービカル	10g,50g,200g	CV-1	CV-2	CV-3	CV-4										
ボディ	10g,50g,200g	A1B	A2B	A3B	A3.5B	A4B	B1B	B2B	B3B	B4B	C1B	C2B	C3B	C4B	
		D2B	D3B	D4B	nA1B	nA2B	nA3B	nA3.5B	nA4B	NW0B	NW0.5B	NP1.5B	NP2.5B	EW00B	
		EW0B	EWB	EWYB											
エナメル	10g,50g,200g (Silky E1:10g,50g) (Silky E2)	E1	E2	E3	Silky E1	Silky E2									
トランスルーセント	10g,50g,200g	T Clear	Tx	T0	T1	T2									
ラスター	10g,50g	LTx	LT0	LT1	LT Super Luster	ELT1	ELT2	ELT3	LT Natural	LT Super Gray	T Blue	LT Royal Blue	Aqua Blue 1	Aqua Blue 2	
		LT Yellow	Incisal Aureola	Sun Bright	LT Coral	Creamy Enamel	Creamy White								
クリアサービカル	10g,50g	CCV-1	CCV-2	CCV-3	CCV-4										
マメロン	10g	Mamelon 1	Mamelon 2												
テッシュ	10g	Tissue 1	Tissue 2	Tissue 3	Tissue 4	Tissue 5	Tissue 6	Tissue 7							
モディファイヤー	10g	White	Gray	Blue	Green	Yellow	Light Orange	Orange	Brown	Pink	Dark Pink	EF-1			
アドオン	10g,50g	AD-T	AD-B												
インターナルステイン	3g	White	Gray	Incisal Blue 1	Incisal Blue 2	Mamelon Orange1	Mamelon Orange2	Cervical 1	Cervical 2	Cervical 3	Earth Brown	Reddish Brown	Salmon Pink	Red	
		A+	B+	C+	D+	Bright	Fluoro								
エクスターナルステイン	3g	Pure White	Gray	Black	Blue	Green 1	Green 2	Yellow	Orange 1	Orange 2	Cervical 1	Cervical 2	Cervical 3	Earth Brown	
		Reddish Brown	Salmon Pink	Pink	Red	A+	B+	C+	D+						
	10g	Glaze													
アドメイト	10g	Light Opaque	Dark Opaque	Light Body	Dark Body	Enamel	Translucent	Luster Translucent							

リキッド類	フォーミングリキッド	100ml	マイスターリキッド	100ml	オペークリキッド	100ml	ペーストオペークリキッド	10ml	ISリキッド	10ml	ESリキッド	10ml	アドメイトフォーミングリキッド	10ml
-------	------------	-------	-----------	-------	----------	-------	--------------	------	--------	------	--------	------	-----------------	------

▶ 色調構成表

	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	NP1.5	NP2.5	EW00	EW0	EW	EWY	NW0	NW0.5					
ペーストオペーク (パウダーオペーク)	POA1(A10) POnA1	POA2(A20) POnA2	POA3(A30) POnA3	POA3.5(A3.50) POnA3.5	POA4(A40) POnA4	POB1 (B10)	POB2 (B20)	POB3 (B30)	POB4 (B40)	POC1 (C10)	POC2 (C20)	POC3 (C30)	POC4 (C40)	POD2 (D20)	POD3 (D30)	POD4 (D40)	PONP1.5	PONP2.5	POEW0	POEW		PONW0	PONW0.5						
マージン	MA1	MA2	MA3	MA3.5	MA4	MB1	MB2	MB3	MB4	MC2+ MDL (1:1)	MC2	MC4+ MDL (1:1)	MC4	MD3+ MDL (1:1)	MD3	MD4	MNP1.5	MNP2.5	MDL	MNW0+ MDL (1:1)	MNW0+ MDL (1:2)	MNW0	MNW0.5						
オペーシャスボディ	OBA1	OBA2	OBA3	OBA3.5	OBA4	OBB1	OBB2	OBB3	OBB4	OBC1	OBC2	OBC3	OBC4	OBD2	OBD3	OBD4	OBNP1.5	OBNP2.5	-	-	-	-	-	-					
サービカル (+ボディ)	-	CV-1+ A2B (1:2)	CV-1+ A3B (1:1)	CV-1+ A3.5B (1:1)	CV-1	-	CV-2+ B2B (1:2)	CV-2+ B3B (1:1)	CV-2	-	CV-3+ C2B (1:2)	CV-3+ C3B (1:1)	CV-3	CV-4+ D2B (1:2)	CV-4+ D3B (1:1)	CV-4	-	CV-1+ NP2.5B (1:2)	-	-	-	-	-	-					
ボディ	A1B nA1B	A2B nA2B	A3B nA3B	A3.5B nA3.5B	A4B nA4B	B1B	B2B	B3B	B4B	C1B	C2B	C3B	C4B	D2B	D3B	D4B	NP1.5B	NP2.5B	EW00B	EW0B	EWB	EWYB	NW0B	NW0.5B					
エナメル	E2		E3			E1	E2	E3		E2	E3			E2	E3		E2		Silky E1		Silky E2								
トランスルーセント/ラスター	T1/LT1																							ELT2		ELT1		T1/LT1	

▶ 焼成スケジュール

焼成条件	陶材種別	乾燥 分	焼成開始 ℃	真空開始 ℃	昇温速度 ℃/分	真空値 kPa※1	真空解除 ℃	焼成最高 ℃	係留		冷却 分
									真空 分	大気 分	
1	ペーストオペーク	8	500	500	65	96	980	980	-	1	0
2	パウダーオペーク OS	3	600	600	55	96	960	960	1	-	0
3	パウダーオペーク 1次	3	600	600	55	96	930	940	-	-	0
4	パウダーオペーク 2次	5	600	600	55	96	920	930	-	-	0
5	マージン ※2	5	600	600	55	96	920	930	-	-	0
6	サービカル、オペーシャスボディ、ボディ、エナメル、マメロン、モディファイヤー ※3	7	600	600	45	96	920	930	-	-	0
7	インターナルステイン	5	600	-	55	0	-	830	-	-	0
8	トランスルーセント、ラスター、クリアサービカル、ティッシュ ※3	7	600	600	45	96	920	930	-	-	0
9	追加築盛 ※4	7	600	600	45	96	910	920	-	-	0
10	セルフグレース	5	600	-	50	0	-	930	-	-	0
11	エクスターナルステイン (Glaze含む)	5	600	-	50	0	-	910	-	-	0
12	マージン MRP ※2	5	600	-	55	0	-	850	-	-	0
13	アドオン	5	600	-	55	0	-	880	-	-	0
14	アドメイト (ウォッシュ焼成)	5	450	450	45	96	700	700	1	-	0
15	アドメイト (後ろう付後の修正)	5	450	450	40	96	660	660	1~2	-	0
16	アドメイト (マージン部の修正)	5	450	450	45	96	670	680	-	-	0
17	アドメイト (焼成と同時にツヤを出す場合)	5	450	450	45	96	690	700	-	-	0

《注意》 焼成条件は、各々のファーンエスの状態や症例の違いによって調整が必要です。焼成条件の過不足によってクラック、剥離もしくは強度不良などトラブルの原因となります。必ず、試し焼きを行い適正温度を確認の上、ご使用ください。

※1 96kPa=72cmHg ※2 マジックフォーマーの使用時は乾燥7分、焼成開始700℃、真空開始700℃

※3 単冠の焼成を基準としています。ブリッジの場合は焼成条件を調整してください。

※4 オペーシャスボディ、ボディ、サービカル、クリアサービカル、エナメル、トランスルーセント、ラスター、マメロン、モディファイヤー、ティッシュを追加築盛する場合の焼成温度です。

●ノリタケ スーパーポーセレンAAA
管理医療機器 歯科メタルセラミック修復用陶材
医療機器認証番号: 223AFBZX00166000

製品・各種技術に関するお問い合わせ

クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

0120-330-922

月曜～金曜 10:00～17:00

ホームページ

www.kuraraynoritake.jp

製造販売元 **クラレノリタケデンタル株式会社**

〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

販売元 **株式会社モリタ**

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL. (06) 6380-2525

〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL. (03) 3834-6161

お客様相談センター: 0800-222-8020

http://www.dental-plaza.com