

管理医療機器 歯科用陶材

セラビアン®ZR FCペーストステイン

CERABIEN[®]ZR

「セラビアン®ZR」にフルジルコニア修復物の
キャラクタライズに適したペーストタイプの表面ステインです。

全27色を取りそろえ、多彩な表現が可能です。





使用方法概要


使用用途3) フルジルコニア修復物
詳しくは電子添文をご確認ください。

STEP 1

ジルコニア修復物の前処理


STEP 2

Glaze 又は
Clear Glaze の
塗布、焼成

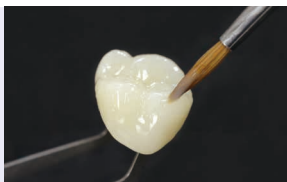


STEP 3

各色FCペースト
ステインの塗布、
焼成、仕上げ

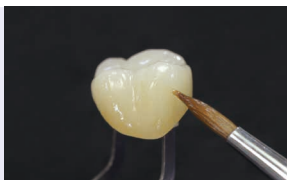


着色例

前歯

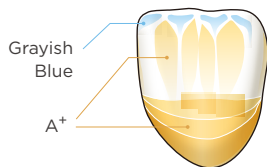

臼歯

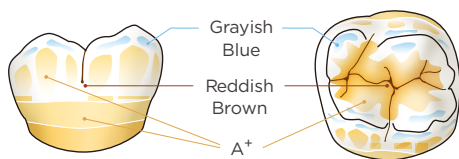

FCペーストステイン 色調構成

ブルー・グレー系の色調【Light Gray、Dark Gray、Grayish Blue、Blue】の充実により切端の表現、2種類のグレイズ【Glaze、Clear Glaze】により歯冠全体の透明感のコントロールが容易になりました。

デンティン色 - Cervical 1 - Cervical 2 - Cervical 3 - A+ - B+ - C+ - D+	エナメル色 - Light Gray - Dark Gray - Grayish Blue - Blue
強調色 - White - Mamelon Orange 1 - Mamelon Orange 2 - Earth Brown - Reddish Brown	調整色 - Value - Black - Green 1 - Green 2 - Yellow - Salmon Pink - Pink - Red - Fluoro
透明色 - Glaze - Clear Glaze	製品の詳細については WEBからもご確認 いただけます

フルジルコニア修復物製作時の焼成条件

フルジルコニア修復物製作では、従来のエクスターナルステインよりも低温の750℃で焼成できます。

本製品をフルジルコニア修復物以外で使用されますと焼成条件が異なります。詳しくは「セラビアン®ZR」総合マニュアル、「セラビアン®ZR」FCペーストステイン総合マニュアル等をご参照ください。

乾燥 (分)	焼成開始 (℃)	真空開始 (℃)	昇温速度 (℃/分)	真空値 (kPa)	真空解除 (℃)	焼成最高 (℃)	係留 (大気) (分)	冷却 (分)
5	500	600	45	96*	750	750	1	4

* 96kPa=72cmHg

セラビアン®ZR 管理医療機器 歯科用陶材 医療機器認証番号:223AFBZX00161000

FCペーストステインキット

- 各5g … Glaze、Clear Glaze
- 各3g … Light Gray、Dark Gray、Grayish Blue、Blue、Cervical 1、Cervical 2、Cervical 3、A+、B+、C+、D+、White、Mamelon Orange 1、Mamelon Orange 2、Earth Brown、Reddish Brown、Value、Black、Green 1、Green 2、Yellow、Salmon Pink、Pink、Red、Fluoro
- カラーガイド ●ESリキッド

FCペーストステインベーシックキット



- 5g … Clear Glaze
- 各3g … Dark Gray、Grayish Blue、Cervical 2、A+、White、Earth Brown、Salmon Pink
- カラーガイド ●ESリキッド

FCペーストステイン 単品

- 各5g … Glaze、Clear Glaze
- 各3g … Light Gray、Dark Gray、Grayish Blue、Blue、Cervical 1、Cervical 2、Cervical 3、A+、B+、C+、D+、White、Mamelon Orange 1、Mamelon Orange 2、Earth Brown、Reddish Brown、Value、Black、Green 1、Green 2、Yellow、Salmon Pink、Pink、Red、Fluoro

●印刷のため実際の色調と異なる場合があります。●ご使用に際しましては、製品の電子添文等を必ずお読みください。●仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

クラレノリタケデンタル株式会社

お問い合わせ

☎ 0120-330-922 平日 10:00~17:00

〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー

【製造販売元】クラレノリタケデンタル株式会社

〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

【販売元】株式会社モリタ

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18

お客様相談センター：0800-222-8020 (医療従事者様向窓口)

クラレノリタケデンタル
LINE公式アカウント

友だち追加はこちらから



最新情報
配信中!

「セラビアン」はノリタケ株式会社の登録商標です。

T828-01 10/2024