

# セシード®N テクニカルインフォメーション

TECHNICAL INFORMATION

Vol. 2

## ワンボディシステム カラーコートご使用のポイント

### カラーコートの使用方法

ワンボディシステム  
**One Body System**

**ステップ 1-1**

**A+塗布(薄く1層塗布)**

- ・歯頸部寄り2/3にごく薄く塗布します。  
(A2に近い色調になります)  
(必ず光重合します)



薄く塗布し  
下地の色調を付与!

**ステップ 1-2**

**A+塗布(色調調整)**

- ・歯頸部寄り1/2に重ねて塗布し、シェードガイドと比色します。
- ・切端方向に徐々に色が淡くなるように薄く塗布します。



比色  
色調調整!

**ステップ 2**

**クリアー1 塗布**

- ・クリアー1を全体に塗布し色調を馴染ませます。
- ・所定の時間光重合



艶出し!

**参考**

**クリアー1 塗布**

- ・あらかじめ、クリアー1を切端寄り1/3に塗布・重合しておく  
と色調が確認しやすくなります。



- Point!** カラーコートは、**薄く塗り重ねる**ことでシェードを調整します。
- Point!** 目標とする**シェードガイドと見比べながら**塗布します。
- Point!** 必要に応じて、**歯頸部1/3付近にA+もしくはサービカル2**を用います。

### カラーコートの注意点



カラーコートプライマーは塗布後、乾燥させます。

**Point!** 光照射は不要です。



カラーコートは採取前に必ず良く振ってから使用して下さい。

**Point!** 色調を均一にさせます。



カラーコートの使用可能時間は約3分です。

**Point!** 注ぎ足し禁止、別の採取皿を使用してください。



筆には多量に採取しないでください。

**Point!** 極力薄く、塗り重ねてください。

●未重合部が残っている場合は乾いたガーゼ等を用いて拭き取ります。●カラーコートの色調及び表面滑沢性は永久的に持続しないため、必要により再処理を行ってください。

●セシード®N 管理医療機器 歯冠用硬質レジン 医療機器認証番号：225ABBZX00173000  
●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。●仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。



製品・各種技術  
に関する  
お問い合わせ

》クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

☎ 0120-330-922 月曜～金曜 10:00～17:00 [www.kuraraynoritake.jp](http://www.kuraraynoritake.jp)

<p>製造販売元 <b>クラレノリタケデンタル株式会社</b> 〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28</p>	<p>販売元 <b>株式会社モリタ</b> 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 <a href="http://www.dental-plaza.com">http://www.dental-plaza.com</a></p>	<p>TEL.(06)6380-2525 TEL.(03)3834-6161</p>
<p>連絡先 <b>クラレノリタケデンタル株式会社</b> 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3(大手センタービル) フリーダイヤル:0120-330-922</p>		