

エブリコード®をお使いの皆様へ

マルチカラーシステム **Multi-color System** の特長

セシード®Nマルチカラーシステムは、皆様方にご愛顧頂いているエブリコード®から色調表現性、操作性、機械的特性を高めた硬質レジンシステムです。


色調表現性の向上

セシード®Nマルチカラーシステムでは、シェードガイドとの色調適合性と築盛厚の影響を抑えるため、エナメルの透明性とオペーク・ボディの色調を最適化しました。

エナメルシェードのリニューアル


マルチカラーシステム **Multi-color System**

セシード®Nではエナメルの透明性を調整することにより、Vita Classical Shade guideとの適合性を高めています。さらにVita Classical Shade guideの明度に合わせ、エナメルの組み合わせを見直しています。

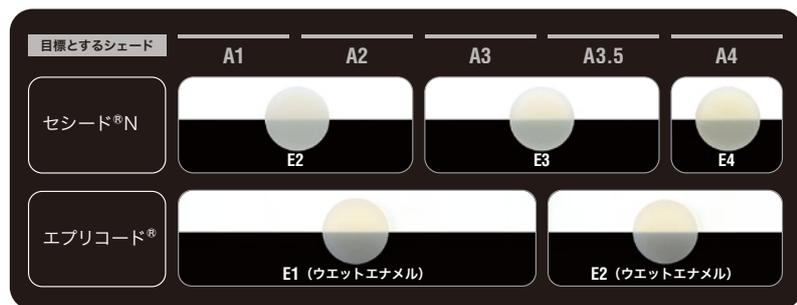

セシード®Nのデンチン・エナメルで築盛するとVita Classical Shade guideの色を表現できます。



エブリコード®と同様の透明感を表現するためセシード®NにはTE1、TE2を用意していますので、切換もスムーズに行えます。

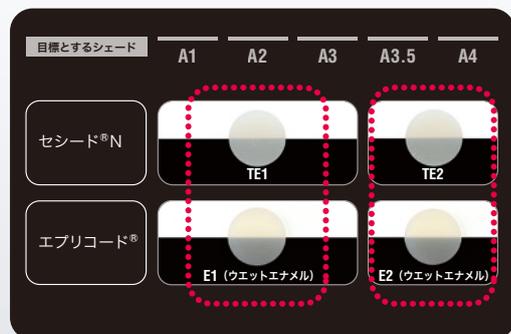

※エブリコード®と同様の透明感を表現したい場合には、TE1、TE2を使用します。

安定した色調表現 (オパーク・ボディ)

ボディに光拡散性を付与するとともに、組み合わせて使用するオパークの色調を調整することにより、築盛厚による色調変化を軽減しています。表は、ボディレジン<sup>®</sup>の厚みを0.75→1.0mm、0.75→1.5mmにした場合の色差(ΔE)を示しています。セシード<sup>®</sup>Nはエブリコード<sup>®</sup>に比べ色調変化が少ないため、常に安定した色調表現が期待できます。

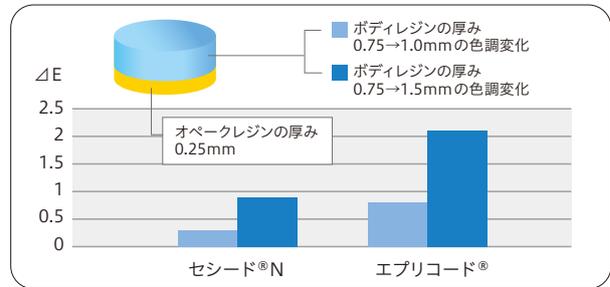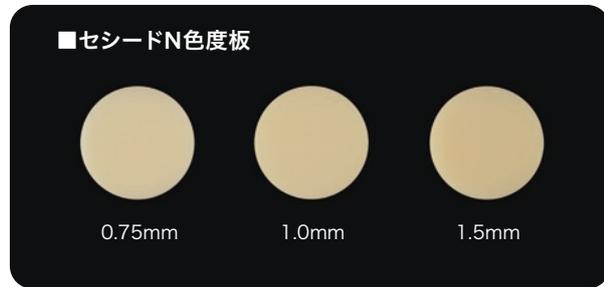

高度な色調表現にも対応 (トランスルーセント、エフェクト)

セシード<sup>®</sup>Nでは、エブリコード<sup>®</sup>やエステニア<sup>®</sup>C&Bをベースに色調をリニューアルしました。これにより、更にレベルの高い色調表現にも対応できます。以下にセシード<sup>®</sup>Nとそれに近いエブリコード<sup>®</sup>の色調を示します。



(使用方法)

- To : 通常の透明感の表現に使用します。
- TN : 暗い透明感の表現に使用します。(エブリコード<sup>®</sup>TLVに比べ暗さを強調しています)
- TB : 青みがかったエナメル質の表現に使用します。
- CW : 白濁したエナメル質の表現に使用します。
- CCV : 鉛色のエナメル質や、透明感のある歯頸部領域の表現に使用します。(エブリコード<sup>®</sup>CTに比べ彩度を高めています。)
- CE : 明度の高いエナメル質の表現に使用します。
- SB : 切縁のオレンジ味を帯びたエナメル質や鉛色と言われるエナメル質の表現に使用します。



ボディ(A3B)、エナメル(E3)、トランスルーセント(To)使用

- ご使用に際しましては添付文書を必ずお読み下さい。●辞典のない測定データはクラレノリタケデンタル株式会社によるものです。●印刷のため実際の色調と異なる場合があります。
- 仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承下さい。●本品の重合に使用する歯科技工用重合装置および歯科重合用照射器につきましては添付文書をお読み下さい。
- セシード<sup>®</sup>N 管理医療機器 歯冠用硬質レジン 医療機器認証番号:225ABBZX00173000 ●エブリコード<sup>®</sup> 管理医療機器 歯冠用硬質レジン 医療機器承認番号:21500BZZ00034000

製品・各種技術に関するお問い合わせ

》クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

0120-330-922 月曜～金曜 10:00～17:00 [www.kuraraynoritake.jp](http://www.kuraraynoritake.jp)

製造販売元 **クラレノリタケデンタル株式会社**  
〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

連絡先 **クラレノリタケデンタル株式会社**  
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3(大手センタービル)  
フリーダイヤル:0120-330-922

販売元 **株式会社モリタ**  
〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL.(06)6380-2525  
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL.(03)3834-6161  
お客様相談センター:0800-222-8020  
<http://www.dental-plaza.com>