

管理医療機器 歯科用象牙質接着材

クリアフィル[®] DC アクティベーター

デュアル・セルフキュア型レジンコアの接着に！

「クリアフィル[®] メガボンド[®] 2」のボンド、または
「クリアフィル[®] ユニバーサルボンド Quick」と混和して使用します。



「クリアフィル® DCアクティベーター」とは

「クリアフィル® メガボンド® 2」または「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick」と混和し、デュアルキュア・セルフキュア型レジンコア材料の接着に、従来の当社デュアルキュア型ボンディング材に比べ、より簡便に使用できます。




● レジンコア材料との組み合わせ表

「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick」※2	「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」※1	その他のレジンコア材料(デュアルキュア・セルフキュア)
「クリアフィル® メガボンド® 2」※3	プライマー	ボンド+本品(混和)
デュアルキュア型ボンディング材	プライマー(混和) 「クリアフィル® ライナーボンドIIΣ」※4	ボンド(混和) または 「クリアフィル® DCボンド」※5



● 接着メカニズム

混和液がレジンコア材料と接触すると硬化を開始します。※6

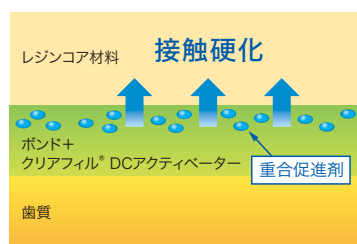

● 牛歯象牙質引張接着強さ

デュアルキュア型ボンディング材使用時と同等の接着強さを示します。

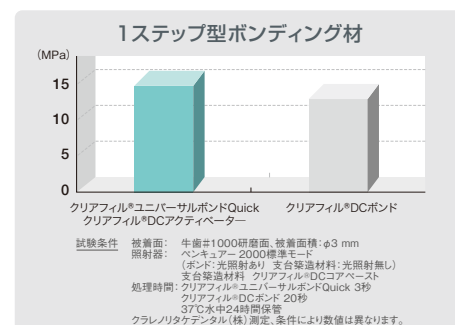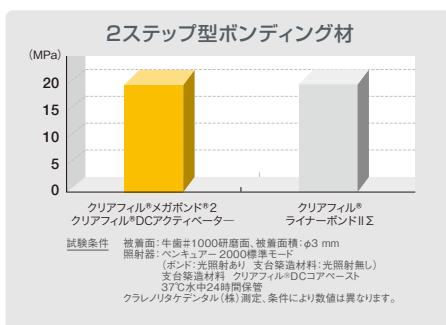

使用ステップ概要

(「クリアフィル® メガボンド® 2」を使用したポスト植立/支台築造※7)

ご使用前に必ず添付文書・取扱説明書をご確認ください。



- 1 窩洞形成
- 2 試適・清掃後
ポストの表面処理
- 3 プライマーの塗布・20秒処理
乾燥(弱～中圧)
・バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで5秒以上乾燥
- 4 ボンドと本品を1滴ずつ混和、
塗布、乾燥(弱～中圧)・光照射※8
・バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで5秒以上乾燥。その後根管内の余剰の混和液はペーパーポイント等で吸い取り、再度エアープローで乾燥
- 5 デュアルキュア型レジンコア材料の填入※9
- 6 最終硬化※9

写真提供: 秋本歯科診療所 秋本 尚武先生

※1 管理医療機器 歯科用支台築造材料 医療機器認証番号: 223ABBZX00086000 ※2 管理医療機器 歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料)(歯科金属用接着材料)(歯科用知覚過敏抑制材料) 医療機器認証番号: 228ABBZX00065000
※3 管理医療機器 歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料)(歯科金属用接着材料)(歯科用知覚過敏抑制材料) 医療機器認証番号: 227ABBZX00114000 ※4 管理医療機器 歯科用象牙質接着材 医療機器承認番号: 20900BZZ00925000
※5 管理医療機器 歯科用象牙質接着材 医療機器認証番号: 218ABBZX00039000 ※6 混和液には必ず光照射を行ってください。 ※7 添付文書の使用用途「デュアルキュア型又はセルフキュア型の支台築造材料を用いたポストの植立/又は支台築造」を示します。
※8 「クリアフィル® メガボンド® 2」の添付文書を参照ください。 ※9 使用する材料の添付文書を参照ください。

クリアフィル® DC アクティベーター



管理医療機器 歯科用象牙質接着材
医療機器認証番号: 228ABBZX00066000
●容量(4mL)

関連商品

クリアフィル® メガボンド® 2 DCアクティベーター キット

管理医療機器 歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料)(歯科金属用接着材料)(歯科用知覚過敏抑制材料) 医療機器認証番号: 228ABBZX00102000

- ボンド(1.7mL)×1個
- プライマー(2mL)×1個
- DCアクティベーター(1mL)×1個



クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick DCアクティベーター キット

管理医療機器 歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料)(歯科金属用接着材料)(歯科用知覚過敏抑制材料) 医療機器認証番号: 228ABBZX00106000

- ボンド(1mL)×1個
- DCアクティベーター(1mL)×1個



●印刷のため、現品と色調が異なることがあります。●仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承下さい。●ご使用に際しましては添付文書を必ずお読み下さい。

製品・各種技術
に関する
お問い合わせ

》クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

0120-330-922 月曜～金曜 10:00～17:00 www.kuraraynoritake.jp

製造販売元 **クラレノリタケ デンタル株式会社**
〒959-2653 新潟県内市倉敷町2-28

連絡先 **クラレノリタケ デンタル株式会社**
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3(大手センタービル)
フリーダイヤル: 0120-330-922

販売元 **株式会社モリタ**
〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL.(06)6380-2525
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL.(03)3834-6161
お客様相談センター: 0800-222-8020
<http://www.dental-plaza.com>