

管理医療機器  
歯科セラミックス用接着材料  
(歯科金属用接着材料、歯面処理材)  
医療機器認証番号：301ABBZX00015000

# カタナ<sup>®</sup> クリーナー

リン酸エステル系モノマー「MDP<sup>®</sup>」配合の  
弱酸性クリーナー

支台歯・補綴装置の清掃で  
併用する接着材料の接着強さを向上




血液

唾液


仮着材・仮封材の残留物

# 接着阻害物質を「浮」かせて流す!

リン酸エステル系モノマー「MDP<sup>®</sup>」と塩基性成分から形成される塩（MDP塩）の界面活性作用とこすり塗りによる物理的作用により清掃

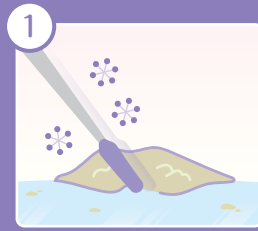

① 「カタナ<sup>®</sup>クリーナー」  
10秒以上こすり塗り

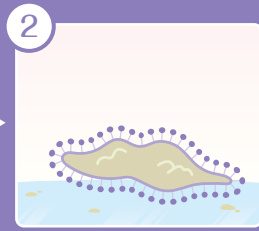

② 接着阻害物質が  
剥がれ始める





③ 接着阻害物質を  
浮かせて流す

## ● 仮着材の残留物による汚染への洗浄効果（被着面観察）


測定条件：被着面：牛歯#1000 研磨面に、仮着材（ポリカルボキシレート系）を用い TEK（即時重合レジン製）を仮着。37℃、湿度 95% で 1 週間保管後、TEK を取り外し、超音波スケーラーで仮着材除去、清掃前後を SEM で観察。

データ測定：クラレノリタケデンタル株式会社  
\*測定条件により結果は異なります。

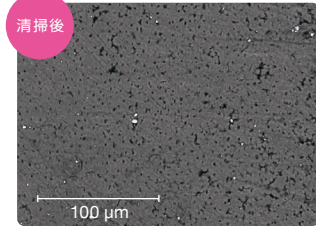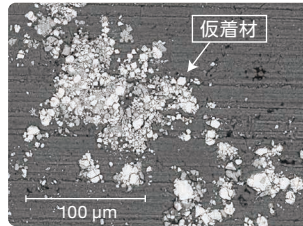

## 高い洗浄効果

接着阻害物質により歯科用接着材の接着力は低下します。「カタナ<sup>®</sup>クリーナー」のご使用によって、併用される接着材料の接着力の向上が期待できます。

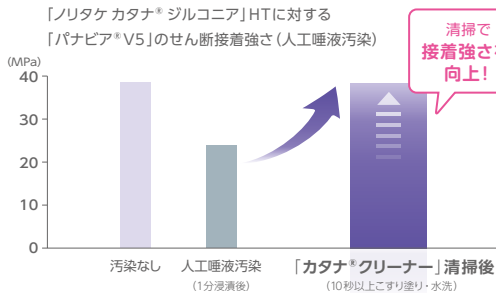

測定条件：#1000 研磨面をサンドブラスト処理、被着面積0.5mm、37℃水中保管1日後測定  
データ測定：クラレノリタケデンタル株式会社 \*測定条件により数値は異なります。


## 口腔内にも使用可能

補綴装置への使用はもちろん、  
窩洞・支台歯へもお使い頂けます。

弱酸性 約 pH4.5

測定方法：JIS Z 8802：2011

## シンプルなステップ

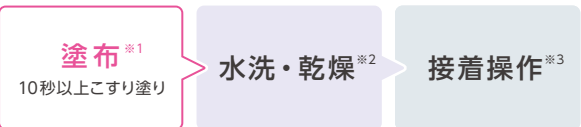

※1 10秒以上こすり塗り（マイクロブラシ・小筆・綿球・スポンジ等を使用）

※2 色が完全になくなるまで水洗した後、エアにて乾燥

※3 併用する歯科用接着材、または歯科用セメントの添付文書にしたがい接着操作

管理医療機器  
歯科セラミックス用接着材料  
(歯科金属用接着材料、歯面処理材)

### カタナ<sup>®</sup>クリーナー

医療機器認証番号：301ABBZX00015000

●単品 4mL



## 関連製品

「カタナ<sup>®</sup>クリーナー」は「パナビア<sup>®</sup>V5」「SAルーティング<sup>®</sup> Multi」や「クリアフィル<sup>®</sup>ユニバーサルボンド Quick ER」などの接着前の清掃に使用できます。

管理医療機器 歯科用セメントキット  
パナビア<sup>®</sup>V5

医療機器認証番号：226ABBZX00106000  
●スターターキット（ユニバーサル）

管理医療機器 歯科接着用レジンセメント  
SA ルーティング<sup>®</sup> Multi

医療機器認証番号：230ABBZX00096000  
●オートミックス 単品 ●ハンドミックス 単品

管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス 医療機器認証番号：223AFBZX00185000 ノリタケ カタナ<sup>®</sup> ジルコニア

管理医療機器 歯科用象牙質接着材（歯科セラミックス用接着材料）（歯科金属用接着材料）（歯科用知覚過敏抑制材料）（歯科用シーリング・コーティング材） 医療機器認証番号：228ABBZX00065000 クリアフィル<sup>®</sup>ユニバーサルボンド Quick ER

## 製品・各種技術に関するお問い合わせ

クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

0120-330-922

月曜～金曜 10:00～17:00

ホームページ

www.kuraraynoritake.jp

- 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。
- ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。
- 仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

連絡先 クラレノリタケデンタル株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー  
フリーダイヤル：0120-330-922

製造販売元 クラレノリタケデンタル株式会社

〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

販売元 株式会社モリタ

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL. (06) 6380-2525  
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL. (03) 3834-6161  
お客様相談センター：0800-222-8020（医療従事者様向け窓口）  
https://www.dental-plaza.com