

管理医療機器 歯科用知覚過敏抑制材料

ティースメイト® ディセンシタイザー

Case A

1. 歯ブラシ磨耗、歯肉後退、歯周炎、歯牙酸蝕等によって露出した象牙質の処置
2. 機械的歯面清掃、スクレーピング、ルートプレーニング後の象牙質の処置
3. 漂白処置後の歯面の処置

添付文書の使用法 Aの1) にしたがって歯面を清掃してください。

1 液材採取⇒粉材採取⇒混和*1
15秒以上混和

2 ペーストのこすり塗り
30秒以上こすり塗り

3 水洗
・余剰ペーストを水洗又はうがい等で取り除きます。

*2 効果の確認

完了

*1: 液材、粉材の採取比について

*2: 知覚過敏症状が消退していない場合は、2、3を繰り返してください。

標準粉液比は以下のとおり

	液材	粉材
1歯分	1滴	計量スプーン 小1杯
2〜3歯分	2滴	計量スプーン 大1杯

Case B

4. コンポジットレジン修復や補綴治療等における形成象牙質の処置

添付文書の使用法 Bの1) にしたがって歯面を清掃してください。

1 液材採取⇒粉材採取⇒混和*1
15秒以上混和

2 ペーストのこすり塗り
30秒以上こすり塗り

3 水洗
・余剰ペーストを水洗又はうがい等で取り除きます。

*2 効果の確認

4 処置後の形成象牙質の清掃*3
水で濡らした綿球等で10秒以上

修復治療
補綴治療

*1: 液材、粉材の採取比については裏面を参照ください。

*2: 知覚過敏症状が消退していない場合は、2、3を繰り返してください。

*3: 形成象牙質表面に僅かに残存するペーストの微小粒子を取り除きます。

「ティースメイト® ディセンシタイザー」に関するお問い合わせ先

ご使用前には、必ず本品の添付文書をお読みください。

製造販売元 **クラレノリタケデンタル株式会社**
〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

連絡先 **クラレノリタケデンタル株式会社**
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3(大手センタービル)
フリーダイヤル: 0120-330-922

販売元 **株式会社モリタ**
〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL.(06)6380-2525
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL.(03)3834-6161
http://www.dental-plaza.com